


EDAN

Care for health


Exportation des tracés sur clé USB

Moniteur Fœtal F3


- Insérer la clé USB dans le port USB du F3

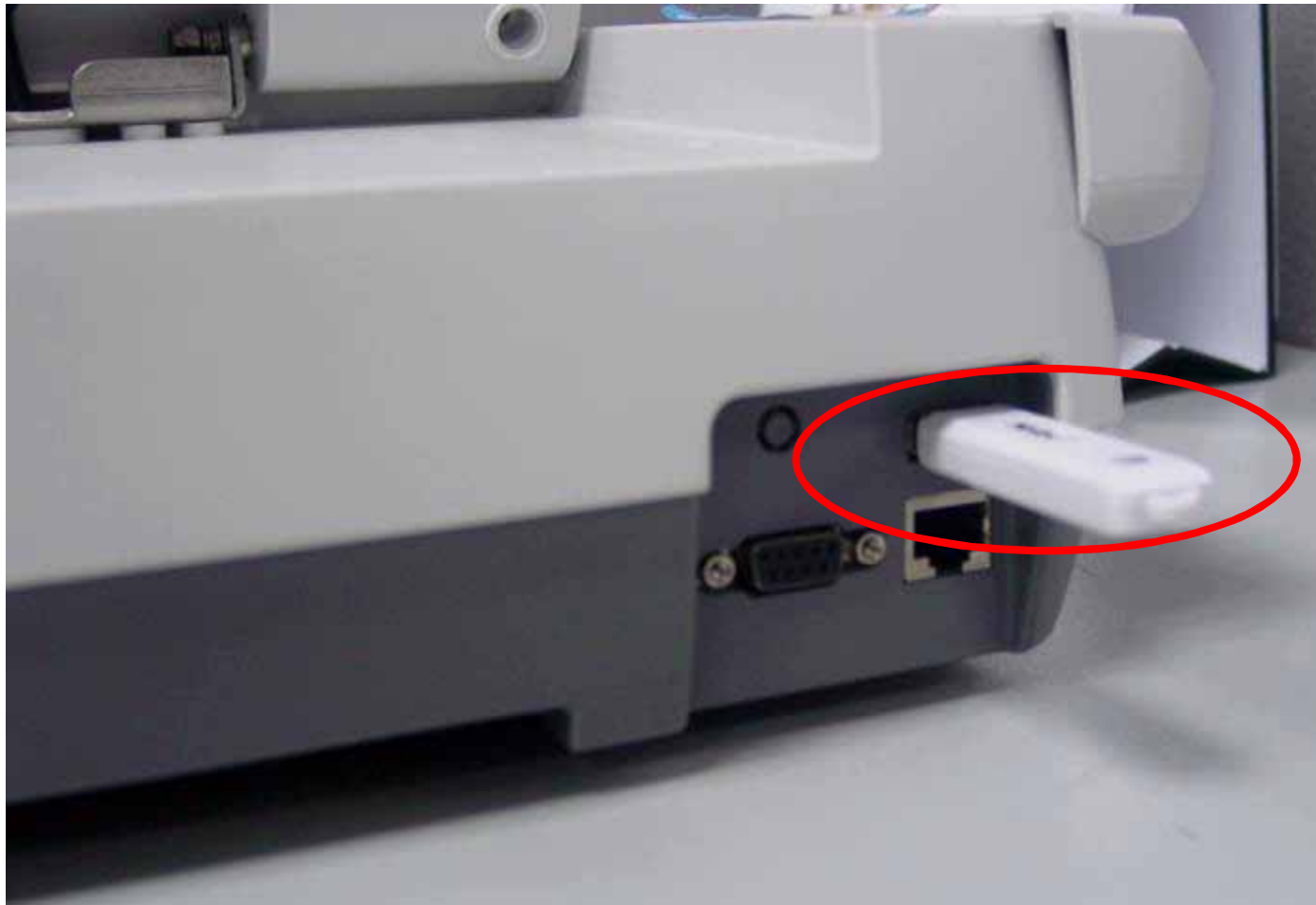

- Attendre l'affichage du message indiquant que la clé USB est bien reconnue par le F3

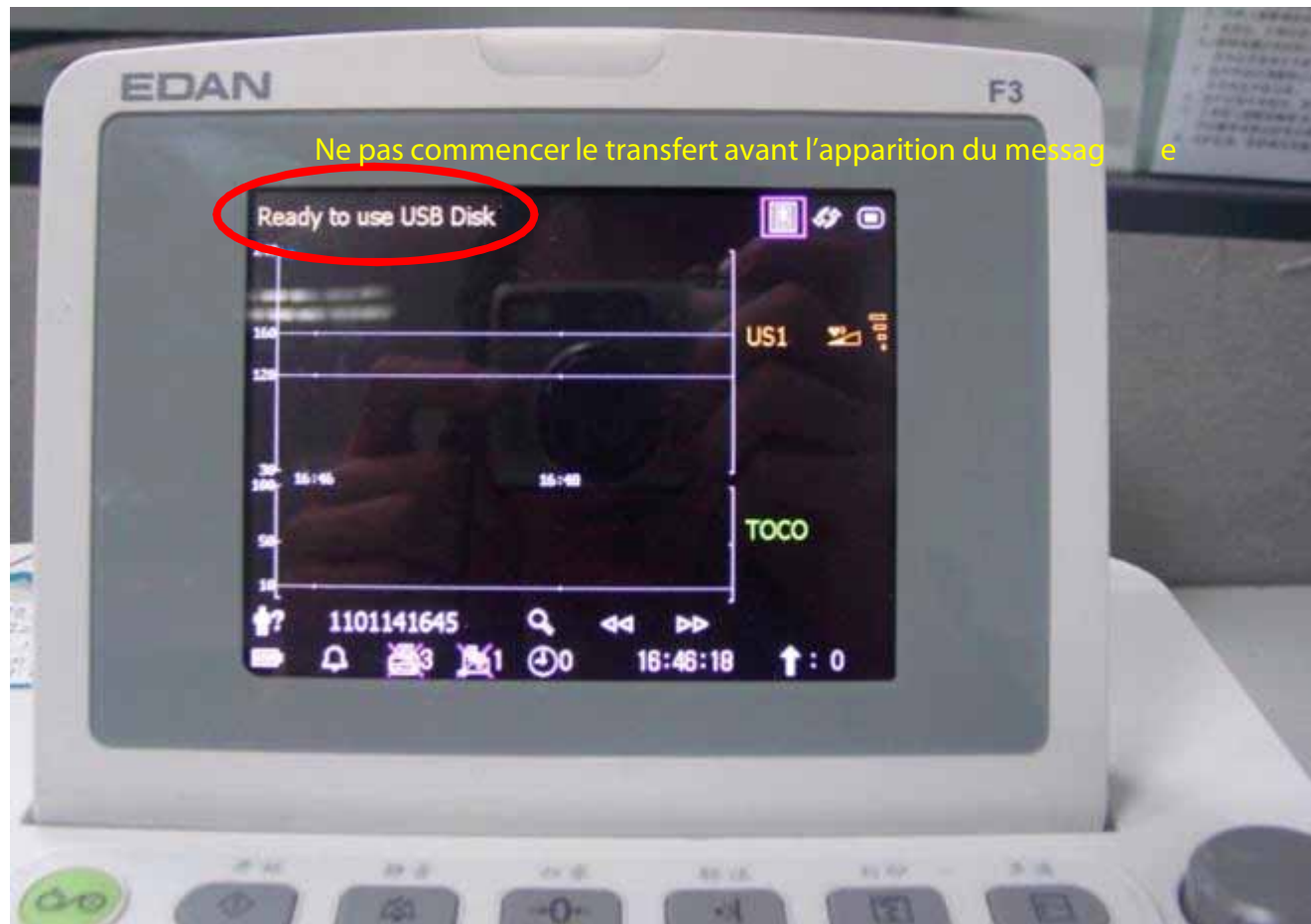


- Transfert de données

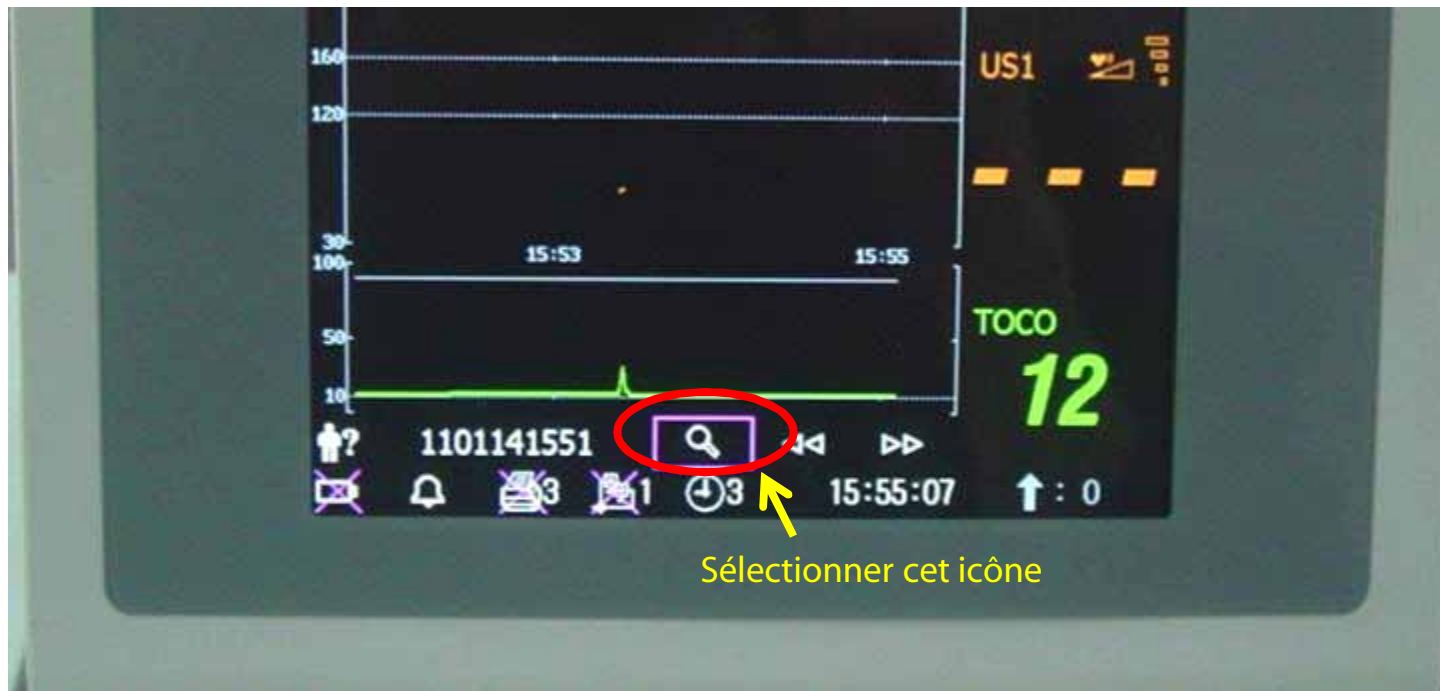


- Transfert de données

Sélectionner la ligne puis valider

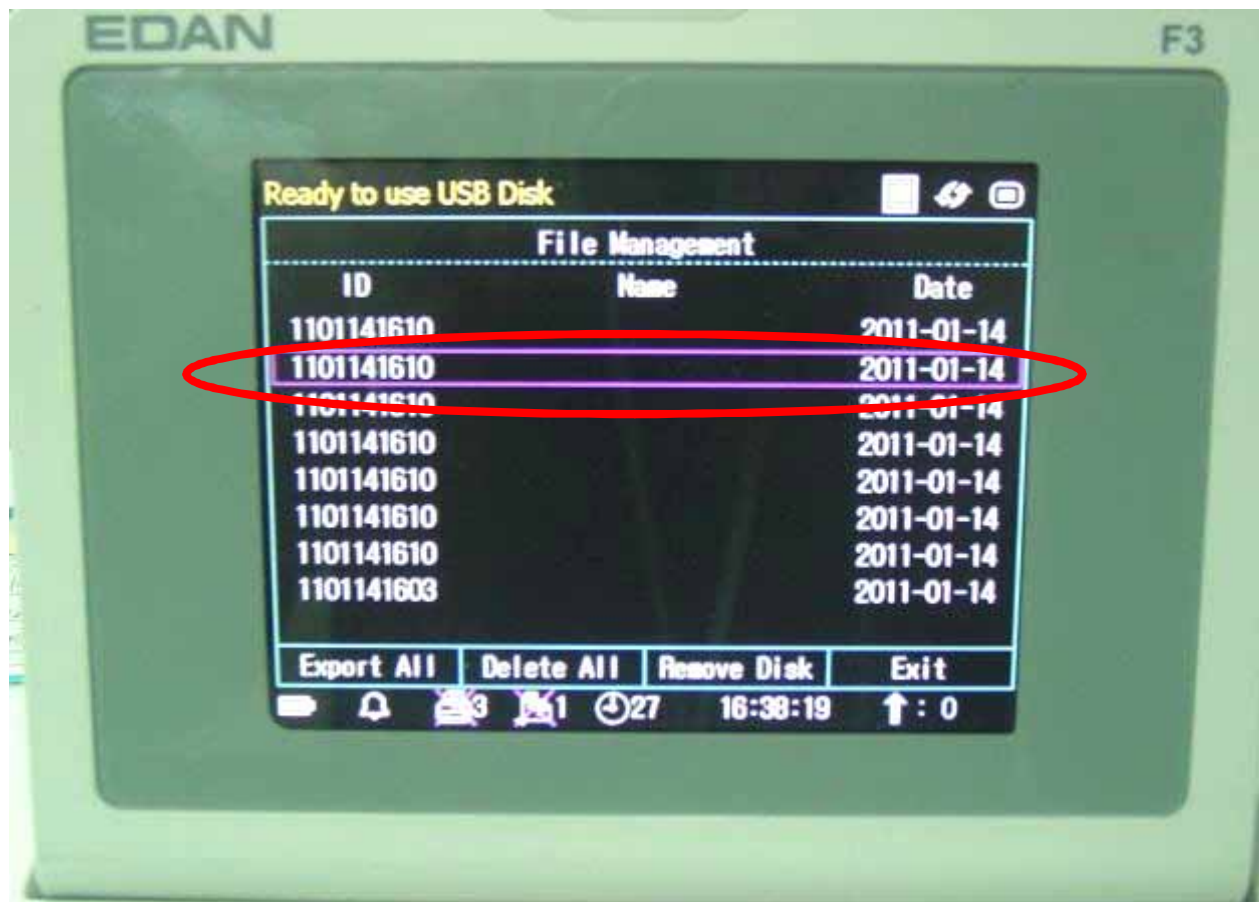

- Transfert de données

Sélectionner " **Export** " pour transférer les données,
Le message " **Data export completed** " apparaîtra lorsque le transfert sera terminé

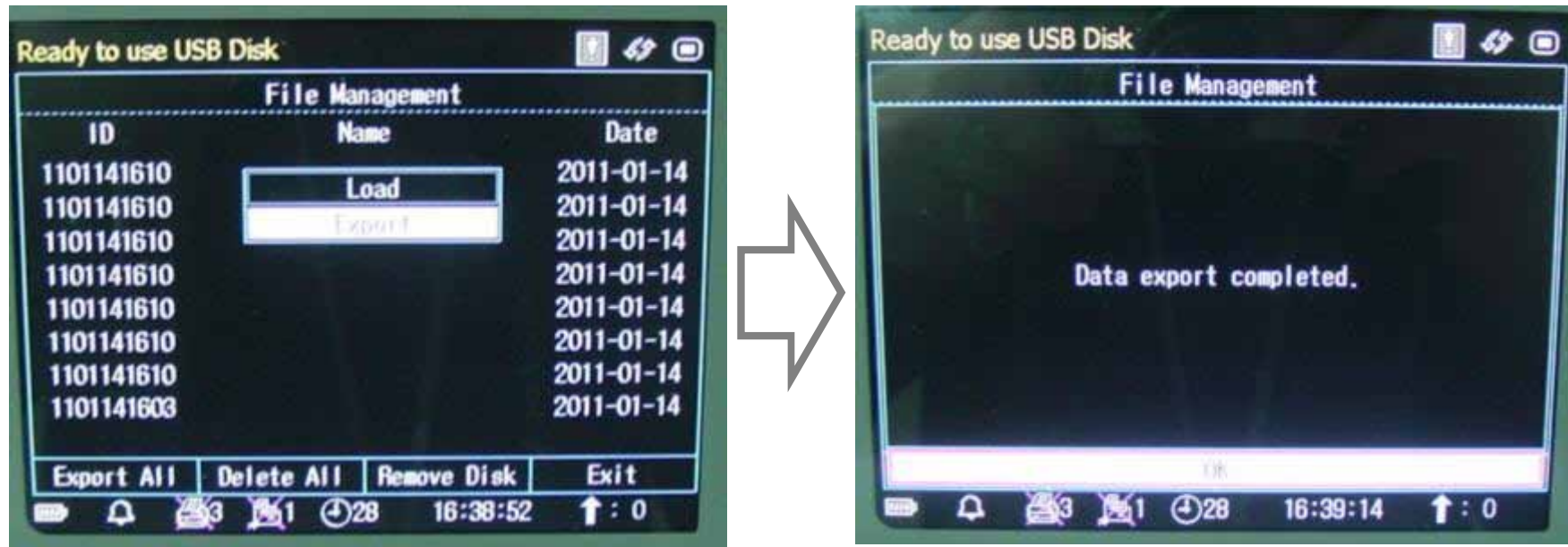


Export All = Exporter toutes les séances vers la clé USB

Delete All = Supprimer toutes les séances du F3

- Retirer le périphérique de stockage



Sélectionner " **Remove Disk** "

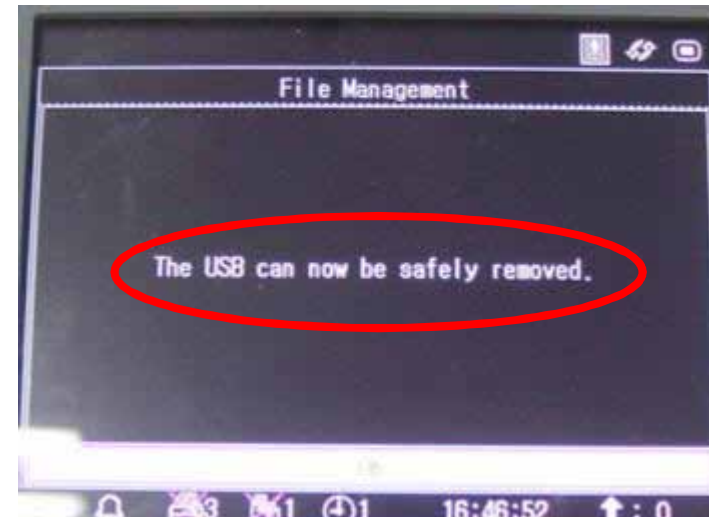

Vous pouvez retirer la clé USB dès que ce message apparaît à l'écran.

- Sauvegarder puis restaurer les fichiers

Les données sont désormais transférées sur la clé USB et sont automatiquement enregistrées dans le dossier fetusdata :

Clé USB : \FetusData

Pour réimporter les séances dans le logiciel Insight :

- lancer Insight
- faire Fichier puis ouvrir OU cliquer sur l'icône Ouvrir Fichier
- sélectionner un tracé présent sur la clé USB