

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

# AMPLICALL50

## Récepteur Portatif



Français

**geemarc™**  
Telecom SA

# SOMMAIRE

<b>SOMMAIRE</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
Découverte de l' AMPLICALL™50	5
<b>DESCRIPTION</b>	<b>7</b>
Vue d'ensemble	7
<b>INSTALLATION</b>	<b>9</b>
Branchements	9
Installation	10
Portée du signal	11
<b>LIAISON AVEC LE RÉCEPTEUR</b>	<b>13</b>
Établir la liaison	13
Annuler la liaison	16

# SOMMAIRE

<b>AMPLICALL™50</b>	<b>19</b>
Allumer et éteindre l'appareil	19
Activer ou désactiver le vibreur	19
Réglage du volume	20
Utiliser l'AMPLICALL™50	20
<b>DÉPANNAGE</b>	<b>21</b>
<b>SECURITE</b>	<b>25</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>31</b>
<b>RECYCLAGE DE L'APPAREIL</b>	<b>34</b>

# INTRODUCTION

Vous venez de faire l'acquisition d'un récepteur Geemarc AMPLICALL™50. Félicitations pour votre achat ! Cet appareil permet de recevoir les signaux transmis par différents émetteurs, notamment ceux de l'AMPLICALL™1/2/3/30/40. L'AMPLICALL™50 vous avertit par un signal clignotant, une alerte sonore et/ou une vibration, que la personne ou le bébé se trouvant près de l'émetteur a besoin de votre aide.

Simple à régler et à utiliser, l'AMPLICALL™50 offre bien entendu une qualité de réception

# INTRODUCTION

optimale, mais il est avant tout un récepteur très performant, que vous pourrez relier à différents types de transmetteurs situés dans la zone de portée du signal.

Pour utiliser au mieux les fonctionnalités de votre appareil Geemarc AMPLICALL<sup>TM</sup>50, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions de cette notice. Conservez ce document pour pouvoir le consulter à nouveau ultérieurement.

# INTRODUCTION

## Découverte de l'AMPLICALL™50

---

En ouvrant la boîte de votre AMPLICALL™50 pour la première fois, vérifiez que vous y trouvez bien tous les éléments suivants :

- 1 AMPLICALL™50
- 3 piles AAA (fournies)

# INTRODUCTION



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.28.58.75.99 ou par fax au 03.28.58.75.76


# DESCRIPTION

## Vue d'ensemble

---

### Avant de l'appareil


Quatre voyants  
lumineux rouges

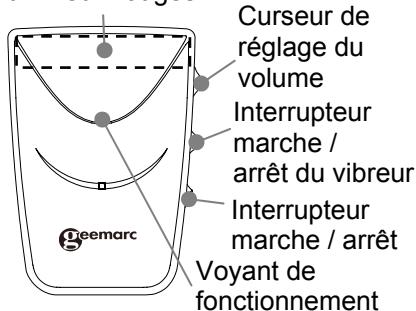



# DESCRIPTION

## Arrière de l'appareil

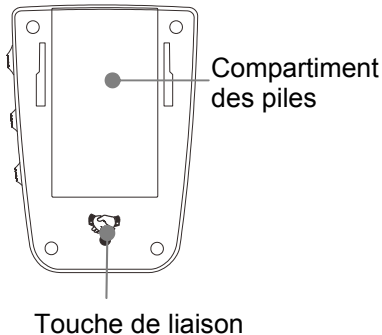

# INSTALLATION

## **Branchements**

---

Pour utiliser l'appareil en configuration mobile, ôtez tout d'abord le capot du compartiment des piles, situé à l'arrière. Insérez 3 piles alcalines (type AAA 1,5V fournies avec l'appareil) dans le compartiment des piles. Faites attention à bien respecter le schéma de polarité indiqué sur le couvercle du compartiment des piles. Remettez le couvercle en place : un déclic indique qu'il est bien positionné.

# INSTALLATION

Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position ON pour allumer l'appareil.

Si le voyant est rouge clignotant

- Lent-Normal
- Rapide-batteries faibles(les remplacer)




## Installation

---

Vous pouvez choisir de transporter l'AMPLICALL™ 50 à la main, ou de l'accrocher à votre ceinture à l'aide du clip fourni :

# INSTALLATION

Le faire glisser dans la glissière à l'arrière du produit pour l'installer.

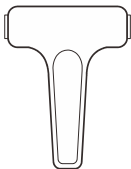

## **Portée du signal**

---

Le fonctionnement optimal de l'appareil est garanti jusqu'à une distance de 30 m. Cette portée est suffisante pour la plupart des habitations. La portée du signal et

# INSTALLATION

la qualité de réception dépendent principalement du niveau de charge des piles et du nombre d'obstacles entre le récepteur et l'émetteur (murs, etc.).

# LIAISON AVEC LE RÉCEPTEUR

## Établir la liaison

---

Maintenez enfoncée la touche de liaison/test de l'AMPLICALL™50, jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Le premier voyant lumineux s'allume. Le mode liaison est maintenant activé.

Vous pouvez maintenant associer le premier voyant à un premier transmetteur, par exemple l'AMPLICALL™1/2/3/30/40, Maintenez enfoncées simultanément la touche de liaison/test de l'AMPLICALL™50 et la touche d'alarme du transmetteur,

# LIAISON AVEC LE RÉCEPTEUR

par exemple  
l'AMPLICALL™ 1/2/3/30/40,  
jusqu'à ce que le voyant central  
clignote et jusqu'à ce que vous  
entendiez un long bip sonore  
confirmant la liaison.

Pour continuer la procédure et  
associer un 2<sup>ème</sup>, un 3<sup>ème</sup> ou un  
4<sup>ème</sup> transmetteur, appuyez à  
nouveau sur la touche de liaison /  
test lorsque le premier voyant est  
allumé. Le 1<sup>er</sup> voyant s'éteint, et le  
2<sup>ème</sup> voyant s'allume. Vous pouvez  
maintenant établir la liaison avec le  
2<sup>ème</sup> appareil en maintenant

# LIAISON AVEC LE RÉCEPTEUR

enfoncées simultanément la touche de liaison/test de l'AMPLICALL™50 et la touche d'alarme du transmetteur, jusqu'à ce que le voyant central clignote et jusqu'à ce que vous entendiez un long bip sonore confirmant la liaison.

Vous pouvez recommencer la même procédure pour associer un 3<sup>ème</sup> ou un 4<sup>ème</sup> transmetteur / appareil extérieur.



## **Annuler la liaison**

---

Maintenez enfoncée la touche de liaison / test pendant 5 secondes, jusqu'à ce que tous les voyants s'allument. Le mode annulation de la liaison est maintenant activé.

Pour annuler la liaison avec le 1<sup>er</sup> appareil, appuyez une fois sur la touche de liaison / test pour que le premier voyant clignote (les deux autres voyants restent allumés), puis maintenez enfoncée la touche de liaison / test. Le premier voyant s'éteint, un bip sonore retentit pour confirmer que la liaison avec le

# LIAISON AVEC LE RÉCEPTEUR

premier appareil distant est bien annulée.

Si vous souhaitez annuler la liaison avec le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> appareil, mais maintenir la liaison avec le 1<sup>er</sup> appareil, appuyez une fois sur la touche de liaison / test quand le premier voyant clignote pour sélectionner l'appareil que vous ne souhaitez plus utiliser, puis maintenez enfoncée la touche de liaison / test jusqu'à ce que le deuxième ou le troisième voyant s'éteigne, et jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore

# LIAISON AVEC LE RÉCEPTEUR

confirmant que la liaison a bien été annulée.

Si vous souhaitez annuler la liaison avec le 4<sup>ème</sup> appareil, mais maintenir la liaison avec le 1<sup>er</sup>, le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> appareil : appuyez quatre fois sur la touche de liaison / test quand le premier voyant clignote - les trois voyants se mettent à clignoter - puis maintenez enfoncée la touche de liaison / test jusqu'à ce que les trois voyants s'éteignent, et jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore confirmant que la liaison avec le 4<sup>ème</sup> appareil a bien été annulée.

## Allumer et éteindre l'appareil

---

Vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil en utilisant l'interrupteur marche / arrêt.

## Activer ou désactiver le vibreur

---

Vous pouvez activer ou désactiver le vibreur en utilisant l'interrupteur marche / arrêt du vibreur. Si la fonction est activée, l'AMPLICALL™50 vibrera pour vous avertir qu'un signal a été capté.

## Réglage du volume

---

Vous pouvez désactiver l'alarme sonore, ou régler le volume sur un niveau faible ou élevé, en utilisant le curseur de réglage du volume.

## Utiliser l'AMPLICALL™50

---

Lorsqu'un transmetteur associé détecte des pleurs / une voix / un bruit, ou si l'on appuie sur la touche alarme, le récepteur AMPLICALL™50 émet une alarme sonore et/ou clignote et/ou vibre pour vous avertir, et vous indiquer que l'on a peut-être besoin de votre aide.

# DÉPANNAGE

## **Impossible d'allumer l'appareil**

- Vérifiez que les piles sont correctement positionnées et qu'elles correspondent au modèle demandé.
- Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché.

## **Le récepteur (AMPLICALL™50) émet un son aigu (parasite)**

- Assurez-vous que l'AMPLICALL™1/2/3/30/40 et l'AMPLICALL™50 sont éloignés d'au moins 3 m.
- Diminuez le réglage du volume

# DÉPANNAGE

**Le récepteur (AMPLICALL™50) m'avertit uniquement par intermittence, ou ne m'avertit pas du tout**

- Vérifiez que la liaison entre les appareils a bien été établie.  
Recommencez la procédure de liaison
- Vérifiez que l'AMPLICALL™1/2/3/30/40 et l'AMPLICALL™50 ont bien été allumés
- Vérifiez que le volume de l'AMPLICALL™50 n'a pas été coupé

# DÉPANNAGE

- Vérifiez que les piles sont correctement positionnées et qu'elles correspondent au modèle demandé.
- Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché.
- Peut-être les appareils sont-ils trop éloignés l'un de l'autre, et donc hors de portée du signal
- Réglez le retard au déclenchement sur une valeur faible et la sensibilité sur une valeur élevée



# DÉPANNAGE

## **La qualité sonore se dégrade**

- Vérifiez que les piles sont correctement positionnées et qu'elles correspondent au modèle demandé.

## **La LED d'alimentation clignote rapidement**

- Remplacez les piles ou branchez l'adaptateur secteur

# SÉCURITÉ

## Généralités

N'ouvrez jamais l'appareil (sauf pour remplacer les piles).

Contactez le service d'assistance pour toute réparation.

L'AMPLICALL™50 a notamment été conçu pour vous aider à surveiller vos enfants. Cet appareil ne peut remplacer la vigilance d'un adulte.

Ce produit n'est pas un jouet.

L'émetteur utilise les ondes aériennes publiques. Votre

# SÉCURITÉ

conversation pourra être captée par un autre appareil utilisant la même fréquence.

Veillez à toujours maintenir les appareils électriques et les câbles d'alimentation hors de portée des bébés et des jeunes enfants.

Faites attention aux câbles et autres fils, un enfant pourrait s'y prendre les pieds et trébucher.

## **Nettoyage**

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas

# SÉCURITÉ

de lustrant ou de produit nettoyant : vous pourriez endommager le revêtement extérieur ou les composants électriques à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil est branché sur le secteur, n'oubliez pas de le débrancher avant de le nettoyer.

## **Environnement**

Évitez d'exposer directement l'appareil aux rayons du soleil.

Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour de l'appareil.

# SÉCURITÉ

Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bains.

N'exposez pas votre appareil au feu ou à tout autre environnement dangereux.

## **Piles**

La manipulation des piles pourra uniquement être effectuée par un adulte, ou sous la surveillance d'un adulte.

# SÉCURITÉ

Vérifiez bien que les piles sont correctement positionnées, en respectant les signes de polarité (+) et (-) indiqués sur les piles et l'appareil.

Ne laissez pas des piles usées dans l'appareil.

N'utilisez pas des piles rechargeables.

Ne mélangez pas des piles neuves à des piles usées, ni des piles de différents modèles.

# SÉCURITÉ

Ne jetez pas les piles usées avec les ordures ménagères, respectez la réglementation sur le recyclage des piles et batteries.

Pensez à enlever les piles de l'appareil si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant longtemps.

Utilisez exclusivement des piles du type recommandé pour l'appareil.

# GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'œuvre. Pendant cette période, Geemarc réparera (ou remplacera si nécessaire) votre appareil gratuitement. En cas de problème, nous vous invitons à consulter notre site internet sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées ou les problèmes causés par la négligence de l'utilisateur. Seuls les techniciens agréés Geemarc sont autorisés à intervenir sur votre appareil. La garantie Geemarc ne limite en



# GARANTIE

aucun cas les droits que vous accorde la loi.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE VOTRE GARANTIE. ELLE VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE.

**Remarque: La garantie s'applique uniquement en France**

# GARANTIE

**DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ:** Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE 1995/5/EEC, et en particulier l'article 3 sections 1a, 1b et 3.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :*

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)



# RECYCLAGE DE L'APPAREIL

La directive WEEE (recyclage des appareils électriques et électroniques) a été mise en place pour assurer le recyclage des produits parvenus au terme de leur cycle de vie.

Si votre appareil ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères.

Nous vous remercions de bien vouloir procéder de la façon suivante:

- Enlevez les piles ou batteries de l'appareil et confiez-les à un centre de recyclage ou à un point de collecte. Déposez ensuite

# RECYCLAGE DE L'APPAREIL

l'appareil dans un container de recyclage adapté.

- Vous pouvez également remettre votre appareil usagé à votre revendeur. Si vous achetez un nouvel appareil, le vendeur est tenu de vous reprendre l'ancien.

En appliquant ces recommandations simples, vous contribuez à la protection de l'environnement et à la santé de tous.





N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.28.58.75.99 ou par fax au 03.28.58.75.76



UGAmplical50\_Fr\_v1.2

**geemarc** United Kingdom

5 Swallow Court  
Swallowfields  
Welwyn Garden City  
Hertfordshire, AL7 1SB  
For product support:  
01707 384438

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc** France

Parc de l'Etoile  
2, rue Galilée BP20061  
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX  
TEL. SERVICE APRES VENTE:  
03 28 58 75 99

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**geemarc** Deutschland

Siemensstrasse 10,  
53121 Bonn  
Deutschland  
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0  
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)