

GEEMARC

CLEAR SOUND™
HEAR THE DIFFERENCE

CL8350

Téléphone GSM Amplifié



Français

geemarc™
Telecom SA

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
INTRODUCTION	5
Découverte de l'appareil	6
DESCRIPTION	7
Vue d'ensemble	7
Navigation dans les menus	15
MISE EN SERVICE	16
Services réseau	16
Mots de passe	16
Insérer la carte SIM et la batterie	17
Recharger la batterie	18
Autonomie de la batterie	20
Allumer et éteindre le téléphone	21
UTILISATION	22
Mode veille	22
Mode économie d'énergie	22
Passer un appel	22
Appeler un numéro de la Liste des appels	23
Passer un appel à partir du Répertoire	24
Utiliser les touches mémoires M1/M2/M3	25
Recevoir un appel	25
Rejeter un appel	25

SOMMAIRE

Mains libres	26
Mettre un appel en attente	26
Mettre fin à un appel	27
Commencer un nouvel appel	27
Répertoire	28
Ecrire un SMS	28
Touche Secret	29
Numérotation DTMF	29
Réglage du volume et de la tonalité de réception	30
Durée des appels	30

RÉPERTOIRE 31

Créer un contact	32
Créer un contact depuis l'écran de veille	34
Consulter le répertoire	35
Fonctions disponibles pour un contact	36
Copier ou supprimer un ou plusieurs contacts	37
Groupes d'appel	38
Modifier le nom et la sonnerie d'un groupe	39
Enregistrement d'un numéro abrégé	40
Paramètres du répertoire	41
Numéros supplémentaires	42

MESSAGES 43

Envoyer un SMS	43
Recevoir un SMS	44

SOMMAIRE

Consulter les messages archivés	44
Boîte d'envoi	45
Modèles SMS	46
Réglages SMS	46
Serveur de messagerie vocale	46
RÉGLAGES	47
Réglage de la Tonalité	47
Réglage de la fonction Boost	47
Mémoire directe	47
Profils d'utilisateur	49
Fond d'écran	51
Réglages téléphones (Date et Heure/ Mise en marche Arrêt/ Langue/ Méthode de saisie/ Mode LED/ Rétro éclairage)	51
Réglages réseau	52
Réglages sécurités (Sécurité SIM/ verrouillage automatique du clavier)	53
Restauration des paramètres d'usine	54
REGLAGES SOS	56
Réglages SOS	57
MSG vocal	58
ORGANISEUR	59
Calendrier	59

SOMMAIRE

Calculatrice	60
Alarme	61
Bluetooth	61
Liste des tâches	63
Chronomètre	64
SERVICES	65
Compte de données	65
JOURNAL DES APPELS	66
Consulter les listes d'appels	66
Effacer les listes d'appels	67
Réglages des appels (signal d'appel/ renvoi d'appel/ Appels restreints)	68
Réglages avancés (Liste noire/ Rappel automatique/ Affichage de la durée de l'appel/ Bip de rappel du temps d'appel)	70
ACCESSOIRES EN OPTION	73
DÉPANNAGE	74
SÉCURITÉ	77
APPAREILS AUDITIFS	80
SERVICES RÉSEAU	81
GARANTIE	82
RECYCLAGE	84

INTRODUCTION

Vous venez de faire l'acquisition d'un téléphone Geemarc CL8350. Félicitations ! Ce téléphone est compatible avec l'utilisation d'un appareil auditif. Il possède de nombreuses fonctionnalités, avec notamment une alarme, un calendrier, un système de messagerie SMS, un répertoire, un haut-parleur pour les conversations mains libres, le verrouillage automatique du clavier ainsi que des touches de numérotation rapide. Il est doté d'une fonction SOS qui permet de programmer cinq numéros différents comme contacts d'urgence. Une simple pression sur une touche suffira alors pour appeler ces numéros en cas d'urgence.

Les grands caractères à l'écran, particulièrement lisibles, et les grandes touches du clavier contribuent à la simplicité d'utilisation de ce téléphone. La sonnerie du CL8350 est puissante, ainsi que le haut-parleur et le vibreur intégrés. Toutes ces fonctionnalités en font un appareil idéal pour les seniors, les personnes souffrant de troubles de l'audition ou de la vue, ou encore pour tous ceux qui souhaitent un téléphone vraiment facile à utiliser, pour rester joignables.

Pour utiliser au mieux les fonctionnalités de votre téléphone Geemarc, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions de cette notice. Conservez-la pour pouvoir la consulter à nouveau ultérieurement.

Vous trouverez dans cette notice des explications sur l'utilisation du téléphone :

GSM CL8350

INTRODUCTION

Découverte de l'appareil

En ouvrant la boîte de l'appareil pour la première fois, vérifiez que vous y trouvez bien tous les éléments suivants :

- 1 téléphone mobile CL8350
- 1 socle chargeur
- 1 adaptateur secteur
- 1 batterie rechargeable Li-ion
- 1 notice d'utilisation



N'hésitez pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits:


www.geemarc.com

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.28.58.75.99 ou par fax au 03.28.58.75.76


DESCRIPTION

Vue d'ensemble

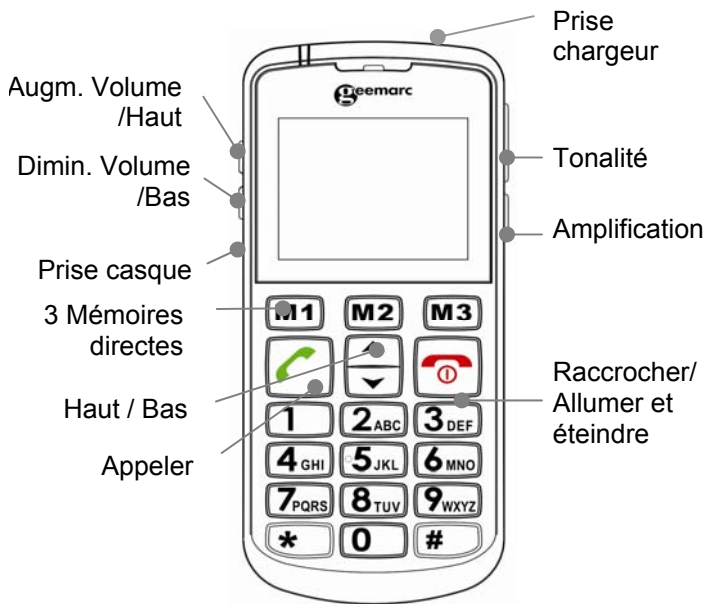

Téléphone (face avant)



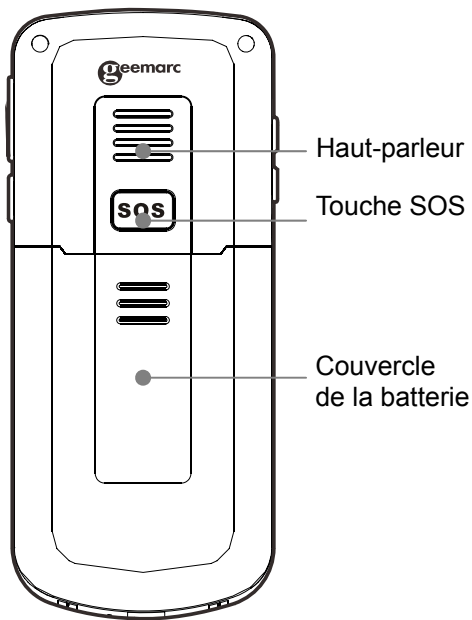


DESCRIPTION







DESCRIPTION

M1 M2 M3	Touches de raccourci / Touches de fonction Vous pouvez associer chacune de ces touches à un numéro de téléphone. Il suffit d'appuyer une fois sur une touche de raccourci pour composer automatiquement le numéro associé. M1 et M3 sont également des touches de fonction: leur rôle varie en fonction du menu actif à l'écran. Leur fonction actuelle correspond toujours au texte situé juste au-dessus à l'écran.
	Allumer & Eteindre / Raccrocher Appuyer longtemps pour allumer ou éteindre le téléphone Appuyer rapidement pour Mettre fin à un appel ou Annuler l'action en cours
	Touches de navigation Haut Fait défiler vers le haut les listes et les options de menu. Vous pouvez configurer cette touche pour accéder rapidement au menu de votre choix à partir de l'écran d'accueil.

DESCRIPTION

	<p>Augmente le volume de l'écouteur / du haut-parleur en conversation.</p> <p>Bas</p> <p>Fait défiler vers le bas les listes et les options de menu.</p> <p>Vous pouvez configurer cette touche pour accéder rapidement au menu de votre choix à partir de l'écran d'accueil.</p> <p>Diminue le volume de l'écouteur / du haut-parleur pendant une conversation.</p>
	<p>Touche d'appel</p> <p>Appeler un correspondant après avoir composé son numéro.</p> <p>Prendre un appel.</p> <p>Accéder au journal des appels</p>
	<p>Touche dièse</p> <p>À partir de l'écran de veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver le mode silence</p>
	<p>Messagerie vocale</p> <p>Maintenez enfoncée la touche 1 pour accéder à la messagerie vocale.</p>

DESCRIPTION

	<p>Touche étoile Appuyez sur cette touche pour insérer des caractères spéciaux dans un message ou pour modifier le nom d'un contact. Ensuite, utilisez les touches ▲, ▼, + et - comme des touches de navigation pour choisir un caractère.</p>
	<p>Touche amplification En cours de conversation, vous pouvez appuyer sur cette touche pour amplifier le volume d'écoute.</p>
	<p>Touche tonalité En cours de conversation, cette touche située du côté droit du téléphone vous permet de modifier la tonalité du son. Vous pouvez régler la tonalité jusqu'à 10 dBm.</p>
	<p>Augmentation du volume / Touche de navigation Permet d'augmenter le volume dans le menu Profils ou lorsque vous recevez un appel. Augmente le volume de l'écouteur / du haut-parleur en conversation. Cette touche permet également de parcourir les listes d'options.</p>

DESCRIPTION



Diminution du volume / Touche de navigation

Permet de diminuer le volume dans le menu **Profils** ou lorsque vous recevez un appel. Diminue le volume de l'écouteur / du haut-parleur pendant une conversation. Cette touche permet également de parcourir les listes d'options.

Description de l'écran d'affichage

L'écran comporte trois zones d'affichage différentes :

La zone des icônes se situe en haut de l'écran. C'est ici que s'affichent les différentes icônes qui vous aident à utiliser votre téléphone.

La zone principale se situe au centre de l'écran. Cette zone affiche les informations suivantes :

- le numéro composé
- le nom/numéro du correspondant
- le répertoire
- les options des menus
- sur l'écran d'accueil, l'heure, la date et le nom de l'opérateur téléphonique

La zone des touches de fonction se situe en bas de l'écran.

DESCRIPTION



Force du signal

Reste affiché tant que le téléphone est allumé. Il indique la qualité du signal de réception. Plus il y a de barres, meilleure est la réception.



Alarme

L'alarme est activée.



Appel manqué

Indique que vous avez manqué un ou plusieurs appels. De nouveaux appels ont été ajoutés au journal des appels.



Verrouillage du clavier

Indique que le clavier est verrouillé.



État de la batterie

Reste affiché tant que le téléphone est allumé. Il indique le niveau de charge de la batterie : plus il y a de barres, plus l'autonomie est importante.

Message



Vous avez reçu un nouveau SMS (message texte).

Vous avez reçu un nouveau MMS.

Vous avez reçu un nouveau message réseau

Secret



La fonction secret est activée.



Silencieux

Le mode de silence du téléphone est activé.

DESCRIPTION



Vous n'entendrez aucune sonnerie en cas d'appel en restant appuyez sur la touche *.



Mélodie

Le téléphone est en mode Mélodie. Une mélodie vous avertira en cas d'appel.



Vibreur

Le téléphone est en mode Vibreur. Une vibration vous avertira en cas d'appel.



Vibreur puis Mélodie

Le téléphone est en mode Vibreur suivi d'une mélodie. En cas d'appel, vous serez d'abord averti par une vibration du téléphone, puis par la mélodie.



Vibreur et Mélodie

Le téléphone est en mode vibreur et mélodie. En cas d'appel, vous serez averti par une vibration du téléphone et par la mélodie.



Casque

Un casque d'écoute est branché.



Bluetooth


La fonction Bluetooth est activée.
La connexion Bluetooth est établie.

DESCRIPTION

Navigation dans les menus

M1 et **M3** sont également des touches de fonction : leur rôle varie en fonction du menu actif à l'écran. Leur fonction actuelle correspond toujours au texte situé juste au-dessus à l'écran.

La touche de fonction **Menu** permet d'accéder au menu. La touche de fonction **Retour** permet de revenir en

arrière dans un menu. Appuyez sur  pour quitter le menu en cours et revenir à l'écran d'accueil.

Les touches ▲ et ▼ permettent de parcourir le menu :



revenir à l'option précédente



passer à l'option suivante

La touche de fonction **OK** vous permet de confirmer ou de sélectionner une action ou un choix à l'écran.

Les options des menus sont normalement associées à un numéro d'accès rapide. Saisissez le numéro du sous-menu dans la liste pour afficher directement l'option souhaitée.

Les touches + et - du côté gauche du téléphone servent également à parcourir les options des menus.

MISE EN SERVICE

Services réseau

Pour utiliser ce téléphone, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. Il existe plusieurs opérateurs, qui proposent différents services (pour des tarifs variables). Les fonctions auxquelles vous aurez accès avec votre téléphone mobile pourront dépendre de votre abonnement.

Mots de passe

Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour sécuriser l'accès à votre téléphone mobile.

Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et un code PIN 2. Le code PIN aide à sécuriser l'accès à votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé pour utiliser certains services.

Les codes PUK et PUK2 vous ont peut-être été fournis avec la carte SIM. Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, vous serez invité à saisir le code PUK. Si vous n'avez pas obtenu ces codes avec votre carte SIM, nous vous invitons à contacter votre opérateur.


MISE EN SERVICE

Insérer votre carte SIM et la batterie

Le téléphone mobile est fourni avec une batterie rechargeable. Avant tout, vous devez mettre en place la batterie et une carte SIM valable.

Commencez toujours par éteindre le téléphone et débrancher le chargeur avant d'enlever ou d'insérer la batterie ou la carte SIM. Manipulez soigneusement la carte SIM. La carte SIM et ses contacts sont fragiles ; il serait facile de les endommager par une éraflure, une pression trop importante.

Pour enlever le couvercle de la batterie, appuyez sur le couvercle vers le bas, et faites le coulisser intégralement. Enlevez maintenant la batterie (si elle est déjà en place) Positionnez la carte SIM dans le logement prévu dans le téléphone, en plaçant les contacts dorés vers le support de carte SIM.

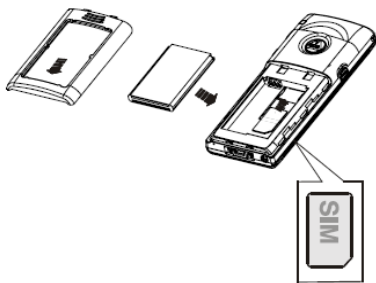

MISE EN SERVICE

Repérez les contacts de la batterie (les contacts dorés doivent se situer en haut à gauche, face au téléphone), et insérez la batterie.



Remettez le couvercle en place.

Recharger la batterie

Recharge à l'aide du socle chargeur

Branchez le chargeur à une prise de courant.

Reliez l'extrémité du câble du chargeur au port mini USB situé à l'arrière du socle chargeur.

Posez maintenant le téléphone mobile sur le socle. Le voyant Batterie dans le coin supérieur droit de l'écran clignote en se remplissant pendant la recharge.

Quand la batterie est complètement rechargée, le voyant représente une batterie chargée, et ne clignote plus.

MISE EN SERVICE



Attention: Utilisez exclusivement la batterie et le chargeur fournis avec votre téléphone. L'utilisation d'un câble non homologué annule la garantie. Vérifiez régulièrement la propreté des contacts de la batterie. Évitez d'enlever trop souvent la batterie car cela peut provoquer des courts-circuits.

Si la batterie est complètement déchargée, vous devrez peut-être attendre quelques secondes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou avant de pouvoir passer un appel (vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge). Quand vous posez le téléphone sur le socle ou que vous branchez directement le câble de recharge, un bip retentit et l'écran affiche le message « chargeur connecté » / « chargeur déconnecté ».


Laissez la batterie en charge pendant au moins 4 heures avant la première utilisation du téléphone.

MISE EN SERVICE

Une fois la carte SIM en place et la batterie chargée, allumez le téléphone en maintenant enfoncée la touche « raccrocher ». Le téléphone mobile recherchera le réseau enregistré, ou tout autre réseau disponible. Lorsque la connexion est établie, le nom de l'opérateur réseau s'affiche au centre de l'écran.

Remarque: Si l'écran affiche "**URGENCE**", c'est que vous n'êtes pas dans la zone de couverture permettant de bénéficier des services du réseau. Vous pouvez cependant passer un appel d'urgence, si le signal est suffisamment fort.

Autonomie des piles

Le symbole  reste affiché en permanence en haut à droite de l'écran. Il indique l'autonomie de batterie dont vous disposez. Le nombre de barres visibles correspond à l'autonomie du combiné. Plus il y a de barres, plus l'autonomie restante est importante.



Lorsque le niveau de la batterie est faible, le téléphone affiche un message d'alerte : "**Recharger la batterie**". Certaines fonctions comme le rétroéclairage de l'écran ne fonctionneront peut-être plus.

Lorsque la batterie est trop faible pour assurer le fonctionnement du téléphone, l'appareil s'éteint automatiquement.

MISE EN SERVICE


L'autonomie en communication et en veille est variable. Lorsque l'autonomie diminue fortement (si vous devez recharger la batterie de plus en plus souvent), il est temps de remplacer la batterie.

Allumer et éteindre le téléphone

Maintenez la touche  enfoncée pendant au moins 3 secondes pour allumer le téléphone.

L'écran affiche alors un message de **bienvenue** (en fonction des paramètres).


Si vous n'avez inséré aucune carte SIM, l'écran affichera **Insérer SIM**. Tant que vous n'aurez pas inséré une carte SIM, vous pourrez uniquement passer des appels d'urgence.

Maintenez encore la touche  enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone. Vous avez un message demandant de valider l'extinction **ETEINDRE ?**. Confirmer en appuyant sur la touche de fonction OUI, puis l'écran s'éteint (en fonction des paramètres).

UTILISATION

Mode veille

On considère que le téléphone est en mode veille quand il est prêt pour utilisation et que vous n'avez appuyé sur aucune touche. Vous pouvez mettre le téléphone en

veille d'une simple pression sur la touche .

Mode économie d'énergie


Votre téléphone propose un mode économie d'énergie, qui permet d'améliorer l'autonomie de la batterie en mode veille, tant que vous n'appuyez sur aucune touche. L'écran est alors désactivé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour repasser en mode veille.

Passer un appel

Composez le numéro de votre correspondant.

Appuyez sur la touche de fonction **EFFACER** pour effacer un caractère en cas d'erreur.

Appuyez sur la touche , le numéro est composé automatiquement.

Pour mettre fin à la communication, appuyez simplement sur la touche .

UTILISATION

Pour passer un appel à l'international, ajoutez un "+" avant l'indicatif du pays (appuyez deux fois sur la touche "*"). Sur certains réseaux téléphoniques étrangers, les postes supplémentaires ne sont pas accessibles directement, et il faut en composer le numéro au clavier. Pour les composer directement, appuyez rapidement sur la touche "*" trois fois de suite après le numéro de téléphone. Le caractère "p" s'affichera alors à l'écran, et vous pourrez saisir le numéro du poste souhaité.


Appeler un numéro de la Liste des appels

La liste des appels contient les numéros composés, les appels reçus et les appels en absence.

Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des appels.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour parcourir la liste.

Appuyez sur la touche , le numéro est composé automatiquement.

Pour mettre fin à la communication, appuyez simplement sur la touche .

UTILISATION


Passer un appel à partir du Répertoire

Si vous avez enregistré des contacts dans le répertoire téléphonique, vous pouvez composer directement ces numéros à partir du répertoire.

Appuyez sur la **Répert..** pour accéder au Répertoire.

Utilisez ▲ et ▼ pour parcourir le répertoire ou saisissez la première lettre du contact recherché : le téléphone affiche alors tous les contacts commençant par cette lettre. Saisissez maintenant la deuxième lettre du contact recherché, le filtre n'affiche plus que les contacts commençant par ces deux lettres, et ainsi de suite.

Appuyez sur la touche , le numéro est composé automatiquement

Pour mettre fin à la communication, appuyez simplement sur la touche 

Utiliser les touches mémoires

Si vous avez associé un numéro de téléphone aux touches de raccourci, appuyez pendant 3 secondes sur la touche **M1**, **M2** ou **M3** (selon la personne que vous

UTILISATION

souhaitez joindre). Le téléphone composera automatiquement le numéro correspondant.

Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et/ou vibre. L'écran affiche le numéro de téléphone de la personne qui cherche à vous joindre. Si le numéro du correspondant est enregistré dans le répertoire, le téléphone affichera le nom du contact.

Appuyez sur la touche



Pour mettre fin à la communication, appuyez simplement sur la touche



Pour prendre un appel, vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction **Répon...** pour prendre l'appel.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. L'écran affiche le numéro de téléphone de la personne qui cherche à vous joindre. Si ce numéro est enregistré dans le répertoire, le téléphone affiche le nom du contact.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Silenci..** puis **Refuser**

UTILISATION

Remarque: si vous avez branché un kit mains libres, vous pouvez décrocher à partir du casque. Si la fonction de réponse automatique est activée et si le kit mains libres est branché, le téléphone prendra automatiquement l'appel après un délai de 2 secondes.

Mains libres

Vous pouvez activer le haut-parleur intégré au téléphone en cours de conversation. En mode mains libres, il n'est pas nécessaire de garder le combiné en main. Vous entendrez votre correspondant dans le haut-parleur et le microphone lui transmettra votre voix.

En conversation, appuyez sur **Mains l..**

Pour désactiver le mode Mains libres, appuyez sur **Normal** une nouvelle fois.

Mettre un appel en attente

Pendant une conversation téléphonique, vous pouvez choisir de mettre un appel en attente (si votre opérateur téléphonique le permet).

En conversation, appuyez sur **OPTIONS.**

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option **Mettre en attente.**

UTILISATION

Choisissez **OK** pour confirmer.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel en conférence si nécessaire :

En conversation, appuyez sur **OPTIONS**.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option
Terminer l'appel.

Choisissez **OK** pour confirmer.

Commencer un nouvel Appel.

Vous pouvez contacter une deuxième personne sans raccrocher, en mettant en attente votre premier correspondant (si votre opérateur le permet).

En cours de conversation, appuyez sur **OPTIONS**.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option
Nouvel appel.

Composez le numéro de votre correspondant.

Appuyez sur la touche , le numéro est composé automatiquement.

UTILISATION

Répertoire

Vous pouvez parcourir le répertoire pendant un appel.

En cours de conversation, appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS**.

Utilisez ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **RÉPERTOIRE**.

Utilisez le répertoire, comme indiqué au chapitre précédent.

Ecrire un SMS

Pour écrire ou modifier un SMS pendant un appel :

En cours de conversation, appuyez sur la touche de fonction **OPTIONS**.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option **SMS**.

Ecrire ou Modifier un SMS.

UTILISATION

Touche Secret

Si vous le souhaitez, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à vos côtés, sans que votre correspondant vous entende. En mode secret, vous pourrez toujours entendre votre correspondant, mais lui ne vous entendra plus.

En cours de conversation, appuyez sur **OPTIONS**.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option
Secret.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction.

Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** pour activer
ou désactiver la fonction secret.

Numérotation DTMF



En cours de conversation, appuyez sur **OPTIONS**.


Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option
DTMF.



Appuyez sur **Activer** ou **Désactiver** pour activer
ou désactiver la tonalité MF.

UTILISATION

Réglage du volume et de la tonalité de réception

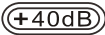En cours de conversation, les touches  et  sur le côté du téléphone et les touches de défilement bas et haut permettent de régler le volume de l'écouteur.

Vous pouvez également utiliser la touche  pour activer ou désactiver l'amplification. Trois réglages de tonalités différents vous sont proposés : Fréquence haute / Fréquence normale / Fréquence basse. Par défaut, la tonalité est réglée sur "Fréquence basse". Vous pouvez passer d'un réglage à un autre à l'aide de la

 touche  qui se trouve sur le côté droit du téléphone.

Durée des appels

Votre combiné décompte automatiquement la durée de chaque appel extérieur. Le temps écoulé s'affiche pendant la conversation. La durée totale de l'appel reste affichée pendant quelques secondes après la fin de la communication.

REPertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et des noms dans le répertoire. Ces informations seront conservées soit sur la carte SIM soit dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez enregistrer différents types d'informations pour un contact : le téléphone mobile, le téléphone au domicile, le numéro au bureau, associer une mélodie à l'appelant.

En sauvegardant les numéros que vous utilisez souvent, vous pourrez passer un appel facilement, sans avoir à mémoriser le numéro ni à le composer manuellement. Vous pouvez consulter les numéros et les sélectionner pour passer un appel, créer un message ou choisir un contact comme numéro d'urgence.

La mémoire du téléphone permet d'enregistrer 300 contacts. Si vous essayez de créer un contact alors que la mémoire est pleine, le téléphone affichera un message d'alerte. Vous devrez alors supprimer un contact pour pouvoir en créer un autre.

Les contacts enregistrés sur la mémoire de la carte SIM sont signalés par les lettres **SIM** (la capacité de stockage sur carte SIM dépend de la carte utilisée). Il est intéressant d'enregistrer les contacts sur la carte SIM, car cela vous permet de transférer les informations d'un téléphone à un autre (la capacité de stockage sur carte SIM dépend du type de carte SIM utilisé).

REPertoire

Ajouter un contact au répertoire

Appuyez sur **Répert..** pour accéder au Répertoire.

Appuyez sur la touche de fonction **Options** et utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option **AJOUTER UN NOUVEAU CONTACT.**

Appuyez sur **Sélect..** pour confirmer.

Utilisez ▲ et ▼ pour choisir l'emplacement d'enregistrement souhaité, soit **sur carte SIM** soit **sur le téléphone**

Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Utilisez le clavier pour entrer le **Nom** de votre choix.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option suivante, pour enregistrer par exemple le **NUMÉRO.**

Utilisez le clavier pour saisir le numéro (n'oubliez-pas le préfixe régional).

Appuyez sur la touche de fonction **Options** et

REPertoire

utilisez ▲ et ▼ pour choisir l'option
Enregistrer ou Annuler pour quitter

Appuyez sur **Sélect..** pour confirmer.

Votre contact est enregistré sur votre carte SIM

Si vous sauvegardez le contact sur le téléphone, continuez à parcourir le menu pour indiquer toutes les informations nécessaires, comme par exemple : numéro de maison, numéro du bureau et assigner une sonnerie au contact.

Les touches du clavier numérique comportent également des lettres. Ces lettres vous permettent de saisir du texte pour créer ou modifier un contact dans le répertoire, pour rédiger un SMS, ou pour rechercher un contact dans le répertoire.

Appuyez sur une touche autant de fois que nécessaire pour obtenir la lettre souhaitée : par exemple, pour obtenir un J, appuyez une fois sur la touche 5 ; pour obtenir un S, appuyez rapidement quatre fois sur la touche 7.

Pour passer à la lettre suivante, il vous suffit d'attendre quelques secondes : le curseur passera automatiquement au caractère suivant. Vous pourrez alors saisir la lettre suivante. Pour passer d'un mode de saisie à un autre (par

REPertoire

exemple, pour passer des minuscules ou majuscules ou saisir des nombres), utilisez la touche #.

Appuyez sur 0 pour insérer un espace.

La touche * vous permet d'ajouter de la ponctuation et d'autres caractères spéciaux. Utilisez ▲ et ▼ et + et - ou les touches 2/4/6/8 pour parcourir la liste, puis appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner et insérer le caractère choisi.

Tableau des caractères

Touche	Caractère	Touche	Caractère
1	..-?!'@:#\$/_ 1	6	MNO6
2	ABC2	7	PQRS7
3	DEF3	8	TUV8
4	GHI4	9	WXYZ9
5	JKL5	0	Espace 0

Créer un contact depuis l'écran de veille

Utilisez le clavier numérique pour saisir le numéro (ajoutez toujours le préfixe régional).

Appuyez sur **Options**, choisir **Enregistrer dans répertoire** puis **Sélecti..**

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'emplacement d'enregistrement souhaité : **Sur SIM** ou **Sur téléphone.**

REPertoire

Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Utilisez le clavier pour entrer le nom que vous associer à ce numéro.

Si vous sauvegardez le contact sur le téléphone, continuez à parcourir le menu pour indiquer toutes les informations nécessaires, comme par ex : numéro maison, numéro bureau et la sonnerie associée.

Appuyez sur la touche de fonction **Options**

Choisissez **Enregistrer** et **Sélecti..** pour enregistrer ou **annuler** pour sortir.

Consulter le répertoire

En utilisant cette méthode, vous atteindrez directement le contact le plus proche de votre critère de recherche.

Appuyez sur **MENU** puis recherchez **Répertoire**, ou utilisez la touche de fonction **Répert...**

Utilisez **▲** et **▼** pour parcourir le répertoire ou saisissez la première lettre du contact recherché : le téléphone affichera alors tous les contacts

REPertoire

commençant par cette lettre. Si vous saisissez maintenant la deuxième lettre du contact recherché, le filtre est affiné pour n'afficher que les contacts commençant par ces deux lettres, et ainsi de suite.

Fonctions disponibles pour un contact

Appuyez sur **MENU** puis recherchez **Répertoire**, ou utilisez le raccourci **Répert...**

Utilisez ▲ et ▼ pour parcourir le répertoire ou tapez la première lettre du contact recherché : le téléphone affiche tous les contacts commençant par cette lettre. Tapez maintenant la deuxième lettre du contact recherché : le filtre affiche les contacts commençant par ces deux lettres, et ainsi de suite.

Appuyez sur la touche de fonction **Options**.

Actions disponibles pour un contact du répertoire:

Composer

Envoyer un SMS

Edition

Afficher

Supprimer(supprimer le contact)

Copier (SIM < --- > Téléphone)

REPertoire

Déplacer (SIM < --- > Téléphone
Num abrégés
Groupe d'appel
Ajouter à la liste noire
Groupes d'appel (page 39)
Réglages du répertoire (page 43)

Exécutez l'action de votre choix, puis confirmez.

Editer : permet de modifier tous les paramètres du contact.

Afficher : permet d'afficher le Nom et le numéro de téléphone du contact

Envoyer un SMS : Permet d'envoyer un SMS au contact

Composer : Permet de composer le numéro

Déplacer : Permet de déplacer un contact de la carte SIM vers la mém Téléphone ou l'inverse

Ajouter à la liste Noire : permet de bloquer le contact de vous appeler

Num abrégés : permet d'enregistrer 8 touches de numérotation rapide avec les touches de 2 à 9

Copier et supprimer un ou plusieurs contacts

Appuyez sur **MENU** puis recherchez **Répertoire**,
ou utilisez le raccourci **Répert...**

REPertoire

Appuyez sur **OK** pour confirmer et ou **Options**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner :
Supprimer– supprimer le contact sélectionné
Copier– copier le contact vers Carte SIM ou Mém
téléphone

Exécutez l'action de votre choix, puis confirmez.

Vous pouvez effacer tous vos contacts ou tous les copier en allant dans le menu **Réglages du répertoire** et choisir **Copier les contacts** ou **Supprimer tous les contacts**.

Groupes d'appel

Vous pouvez classer les contacts de votre répertoire en différents groupes et y associer une mélodie différente pour chaque groupe.

Appuyez sur la touche de fonction **Répert..**

Appuyez sur Options et utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option
Groupe d'appel

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

REPertoire

Entrez le nom du groupe de contacts de votre choix, par exemple "Famille" et choisir la sonnerie associée au groupe.

Appuyez sur **Options** et **Enregistrer**.

Utilisez ▲ et ▼ pour choisir le groupe et appuyez sur **Options** et ensuite **Voir les membres**

Appuyez sur **Sélecti..** pour sélectionner.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option **Ajouter** (s'il n'y a encore aucun membre dans ce groupe, **Ajouter** est la seule option disponible, il est donc inutile de passer par la touche **OPTIONS**).

Sélectionnez un contact du répertoire (**stocké dans la mémoire du téléphone**) et ajoutez-le au groupe.

Modifier le nom et la sonnerie associée d'un groupe de contact

Appuyez sur la touche de fonction **Répert..**

Appuyez sur **Options** et utilisez ▲ et ▼ pour Choisir **Groupe d'appel**.

REPertoire

Appuyez sur **Sélecti..** pour sélectionner.

Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le groupe de contacts de votre choix, par exemple "Famille".

Appuyez sur **Options** pour sélectionner.

Choisissez **Réglages du groupe** pour modifier le nom ou la sonnerie associée.

Vous pouvez maintenant modifier le nom au clavier ou modifier la sonnerie avec les touches 4 et 6.

Appuyez sur '**Options** et choisir **Enregistrer**'

Enregistrement d'un numéro abrégé

Le téléphone possède 8 touches de numérotation rapide (les touches 2 à 9 du clavier numérique). Pour utiliser un de ses numéros raccourcis, restez appuyer sur la touche du clavier pendant 3 secondes. Ne pas oublier d'activer la fonction.

Appuyez sur la touche de fonction **Répert...**

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option **Num abrégés.**

REPertoire

Appuyez sur **Sélecti..** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour choisir
Choisir numéro.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour parcourir la liste
jusqu'à l'emplacement souhaité 2,3,4,5,6,7,8,9,

Appuyez sur la touche de fonction **Editer.**

Choisir votre contact dans votre répertoire à partir de
l'option **Du répertoire**, ou entrez directement le
numéro de téléphone en choisissant **Entrez
numéro** ou **Supprimer** pour vider un Numéro
Abrégé

Paramètres du répertoire

Appuyez sur la touche de fonction **Répert..**

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option
Réglages du répertoire.

Appuyez sur **Sélecti..** pour sélectionner.

REPertoire

Différents réglages sont possibles:

État des mémoires

Support de stockage

Numéros extra (mise à disposition de 4 mémoires supplémentaires)

Copier les contacts (copier tous les contacts sur la carte SIM ou Mém téléphone)

Déplacer les contacts (déplacer tous les contacts sur la carte SIM ou Mém téléphone)

Supprimer tous les contacts (Supprimer tous les contacts de la carte SIM ou de la Mém Téléphone)

Numéros supplémentaires

Appuyez sur la touche de fonction **Répert..**

Appuyez sur **Options** et utilisez ▲ et ▼ pour Choisir **Réglages du répertoire** et ensuite **Numéro extra.**

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Vous avez 4 mémoires aux choix, vous pouvez y entrer un Nom ainsi que le numéro de téléphone

Remarque : Pour utiliser ces numéros, vous devrez aller dans ce menu

MESSAGES

Envoyez un SMS

Ce téléphone vous permet d'envoyer des messages texte comportant jusqu'à 160 caractères, espaces inclus.

Appuyez sur **Menu**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **SMS**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Ecrire un SMS**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Saisissez maintenant votre message texte à l'aide du clavier numérique (consultez la section Répertoire pour apprendre à saisir du texte au clavier)

Appuyez sur la touche de fonction **Option**, C'est ici que vous pouvez insérer un modèle, un numéro ou le nom d'un contact...

Choisissez **Envoyer à** puis appuyez sur **Sélecti...**
Utilisez la fonction **Entrez le numéro** pour composer le numéro du destinataire ou utilisez la

MESSAGES

fonction **A partir du répertoire** pour sélectionner un contact du répertoire.

Entrez le nombre de contact ou de numéro ou vous souhaitez envoyer votre SMS La liste des contacts est affichée à l'écran

Appuyez sur **Options**. Vous aurez plusieurs choix :
Envoyer, **Editer le destinataire** (modifier le numéro de téléphone), **Enlever le destinataire** (supprimer un contact), **Enlever tous les destinataires** (supprimer tous les contacts),
Enregistrer comme brouillon

Vous pouvez utiliser la touche # pour modifier le mode de saisie en cours de rédaction du message.

Recevoir un SMS (boîte de réception)

Une mélodie vous avertit de l'arrivée d'un message (voir le chapitre Profils pour choisir cette mélodie). L'écran affiche **Nouveau SMS non lu**.

Appuyez sur **Afficher** pour lire le message.

Consulter les SMS archivés

Appuyez sur **Menu**.

MESSAGES

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
SMS.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
Boîte de réception (les messages que vous avez
reçus sont conservés dans la boîte de réception) puis
OK.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour parcourir la boîte
de réception jusqu'au message recherché.

Appuyez sur la touche **Options**, choisir **Afficher**
pour afficher le message et appuyez sur **Sélecti...**

Options proposées : **Répondre, Appeler,**
Transférer, Supprimer, Effacer tout, Enregistrer
dans répertoire, Avancé (Copier vers Mem Tel ou
SIM, déplacer vers carte la mém téléphone ou
SIM, copier tout, Déplacer tout.

Boîte d'envoi

Vous pouvez consulter les messages enregistrés dans la Boîte d'envoi. Les messages de la boîte d'envoi peuvent avoir été envoyés ou non. Voici les options proposées : Afficher, supprimer, transférer, copier vers la mémoire

MESSAGES

téléphone, déplacer vers la mémoire téléphone, effacer tout, copier tout, déplacer tout.

Modèles SMS

Vous pouvez définir des modèles de message pour faciliter la saisie. Par ex : Appel moi maintenant !, Quand mangeons nous ensemble ? A tout de suite. Je suis occupé. Désolé ! Vous pouvez créer un nouveau modèle, ou modifier ou supprimer les modèles existants.

Réglages SMS

Carte SIM : vous pouvez régler l'**Adresse SMS**, la **période de validité** de la carte SIM, le **type de message**, **rapport d'envoi** (accusé de réception), **chemin de réponse** et le **serveur de messagerie** vocal (Numéro de téléphone de votre répondeur).

Enregistrer le MSG envoyé : Permet d'enregistrer le SMS dans la boîte d'envoi.

État **des mémoires** (occupation de la carte SIM et Mém Téléphone)

Support de stockage (Carte SIM ou Mém Téléphone)

Serveur de messagerie vocale

Tous les messages vocaux que vous recevez sont archivés sur le réseau. Pour accéder à la messagerie vocale, composez le numéro de votre boîte vocale. Vous pouvez utiliser ce menu pour définir le numéro de téléphone de votre Boîte vocale. Vous pourrez y accéder en restant appuyez sur la touche 1 par la suite.

REGLAGES

Réglage tonalité

Vous pouvez régler l'écoute de votre téléphone avec 3 réglages différents, **Fréquence normale**, **Fréquence basse** (augmentera les basses fréquences) et **fréquence haute** (augmentera les hautes fréquences). A chaque appel, votre téléphone sera programmé suivant votre choix.

Réglage Boost

Cette fonction vous permettra d'activer ou de désactiver la fonction boost de votre appareil pour chaque appel automatiquement suivant votre choix.

Mémoire directe

Vous pouvez associer les numéros du répertoire aux trois touches de numérotation abrégée (**M1**, **M2** et **M3**). Pour utiliser la numérotation rapide, il vous suffit de maintenir enfoncée la touche mémoire de votre choix.

Appuyez sur **Menu**.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher **Réglages**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher **Mémoire directe**.

REGLAGES

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez ▲ et ▼ pour parcourir la liste et sélectionner la touche mémoire de votre choix: 1, 2 ou 3.

Appuyez sur la touche de fonction **Editer**.

Choisir votre contact dans votre répertoire à partir de l'option **Du répertoire**, ou entrez directement le numéro de téléphone en choisissant **Entrez numéro** ou **Supprimer** pour vider une mémoire directe

Voir le chapitre Mémoire directe

Appuyez sur **Menu**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option **REGLAGES**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour sélectionner **Réglages téléphone** ou touche 6.

REGLAGES

Profils d'utilisateurs

Votre téléphone mobile propose quatre profils d'utilisateurs différents. Vous pouvez choisir différents paramètres pour chaque profil. Par exemple, pour le profil extérieur, vous pouvez choisir un volume de sonnerie plus important, mais remplacer la sonnerie par le vibreur pour le profil réunion, etc.

Appuyez sur **Menu** et ensuite choisir **Réglages**
puis **OK**

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option
Profils d'utilisateurs

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'au profil de votre choix. Voici les différents profils disponibles : **Général**, **Silencieux**, **Réunion**, **Extérieur**.

Appuyez sur **Options** pour sélectionner

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu et choisir d'**Activer** ou de **Personnaliser** le profil. Si vous sélectionnez le choix **Personnaliser**, vous aurez accès aux options suivantes :

REGLAGES

Sonnerie appel entrant : Pour les appels entrants (jusqu'à 10 mélodies proposées),

Volume de sonnerie : Pour régler le volume de sonnerie

Sonnerie réception SMS : Choix de la tonalité de réception d'un message SMS parmi les 6 choix.

Volume sonnerie SMS : Pour régler le volume de la tonalité de réception d'un SMS

Tonalité d'alarme : Choix de la tonalité pour le mode alarme parmi les sonneries proposées

Volume d'alarme : Réglage du volume de l'alarme

Tonalité clavier : Réglage du type de son lors d'un appui sur une touche (4 choix possibles, Silencieux, CLIC, Bip et aide vocale)

Volume touche clavier : Réglage du niveau de sonnerie.

Allumage : Choix de l'animation pendant l'allumage de votre appareil

Eteindre : Choix de l'animation pour l'extinction de votre appareil

REGLAGES

Alerte Système : Vous pouvez activer ou désactiver les sons en cas d'avertissement, d'erreur, d'attente sur occupation, de connexion.

Type d'alerte : Les réglages suivants sont proposés : sonnerie seulement, vibreur seulement, vibreur et sonnerie, vibreur puis sonnerie

Type de sonnerie : Les réglages suivants sont proposés : une seule fois (**Un bip**), continue (**répéter**)

Fond d'écran

Vous avez la possibilité de choisir 10 fonds d'écran. Le fond d'écran 1 est spécialement conçu pour les malvoyants (fond noir avec écriture en blanc).

Réglages téléphones

Date et Heure

Réglage du fuseau horaire : Choisissez votre ville

Réglage de la date et de l'heure :

Utilisez le clavier numérique pour saisir la date / l'heure.

Mise en marche/ arrêt

Vous pouvez programmer 2 horaires d'allumage du téléphone et 2 horaires où il s'éteindra automatiquement

Langue

Les menus du téléphone sont disponibles dans 12 langues différentes.

REGLAGES

Méthode de saisie préférée

6 modes de saisie de texte différents vous sont proposés.

Mode LED : 3 modes disponibles **On** en fonctionnement, **Fermer** (toujours éteinte) et **Mode de nuit** (éteinte la nuit seulement)

Rétro éclairage de l'écran :

Réglages de la luminosité de l'écran avec les touches 4 et 6

Réglage de la durée avant activation de l'économiseur d'écran: de 5 sec à 1 minute

Réglages réseau

Appuyez sur **Menu**

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher l'option **REGLAGES**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
Réglage réseau.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

REGLAGES

Nouvelle recherche : Permet de rechercher tous les réseaux disponibles

Choisir le réseau : affichage de la recherche de réseau, choisissez votre réseau et validez en appuyant sur **OK**

Mode de sélection : 2 modes disponibles, automatique ou Manuel.

Réglages Sécurité

Appuyez sur **Menu**.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
REGLAGES.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
Réglages de sécurité.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Vous pouvez enregistrer des mots de passe pour sécuriser l'accès à votre téléphone mobile.

Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN et un code PIN 2. Le code PIN aide à sécuriser l'accès à

REGLAGES

votre carte SIM. Le code PIN 2 vous sera demandé pour utiliser certains services.

Les codes PUK et PUK2 vous ont peut-être été fournis avec la carte SIM. Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, vous serez invité à saisir le code PUK. Si vous n'avez pas obtenu ces codes avec votre carte SIM, nous vous invitons à contacter votre opérateur.

Sécurité SIM

Verrouillage SIM

Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage de la carte SIM (code PIN). Le code PIN est nécessaire pour activer ce verrouillage.

Modifier le code PIN

Ici, vous pouvez modifier le code PIN.

Verrouillage automatique du clavier

Vous pouvez choisir de désactiver le verrouillage du clavier, ou de verrouiller le clavier si aucune touche n'a été utilisée après un délai de 5 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

Restauration des paramètres d'usine

Appuyez sur **Menu**.

REGLAGES

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
REGLAGES.

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour
sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le
menu jusqu'à l'option
Restaurer paramètres d'usine.

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour
sélectionner.

Si vous choisissez de restaurer les paramètres par défaut du téléphone, toutes les fonctions personnalisées par l'utilisateur seront réinitialisées.

Remarque: le code par défaut est 1122 ; nous vous conseillons de le remplacer rapidement par un code personnalisé.

REGLAGES SOS

Quand vous appuyez sur le bouton SOS au dos du téléphone pendant 2-3 secondes, une alarme se déclenche. Le téléphone appelle alors automatiquement l'un après l'autre les numéros SOS ou votre centre d'appel suivant le mode choisi. Dès que la communication est établie, l'alarme s'arrête, et la conversation peut commencer.

La communication commence par la diffusion d'un message vocal préenregistré : "Ceci est un appel d'urgence, Merci d'appuyer sur la touche "0" pour confirmer."

Si le correspondant appui sur la touche "0", la conversation peut commencer. Sinon, la communication prendra fin après 30 secondes et le téléphone appellera le numéro suivant sur la liste, jusqu'à ce qu'une personne valide la réception de l'appel d'urgence.

Si votre correspondant appuie sur la touche "0" lorsque la communication est établie, le téléphone reprendra ce cycle de numérotation après qu'il aura accroché. Si par contre votre correspondant appuie sur une autre touche, par exemple "1" ou "2", la communication prendra fin après 30 secondes. Après le cycle d'appels d'urgence, le téléphone enverra des messages aux contacts SOS enregistrés, l'un après l'autre (envoi des coordonnées géographiques de la position du téléphone).

REGLAGES SOS

Appuyez sur **Menu**.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher les **REGLAGES SOS**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option **Réglages SOS**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Réglages SOS

Mode SOS

3 modes disponibles

5 Numéro SOS : Appel les numéros SOS

Centre d'appel : Appel le numéro du centre d'appel

Désactiver : Désactivation de la fonction SOS.

Numéros SOS

Vous pouvez définir jusqu'à cinq numéros SOS.

Entrez vos numéros suivant l'ordre souhaité.

Appuyez sur EDITER pour y mettre un numéro.

2 choix possibles :

Soit en choisissant un contact du répertoire (**Du répertoire**) soit en entrant directement le numéro (**entrez numéro**)

REGLAGES SOS

Numéro central d'appel : Vous permet d'entrer le numéro de votre central d'appel

Choix MSG vocal SOS :

MSG par défaut : Cette fonction vous permet de Sélectionner le message d'appel d'urgence d'origine en choisissant la fonction **Sélectionner**. Vous pouvez l'écouter en sélectionnant le mode **Lecture**.

MSG SOS enregistré :

Vous pouvez enregistrer un message SOS vocal. Les options suivantes vous sont proposées :

Enregistrer : effectuer un nouvel enregistrement. Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche de fonction gauche pour marquer une Pause ou reprendre l'enregistrement, ou appuyer sur la touche de fonction droite pour arrêter l'enregistrement. Appuyer sur la touche de fonction gauche pour le sauvegarder. Vous pouvez appuyer sur la touche de fonction **M2** si vous désirez arrêter l'enregistrement avant la fin des 20 secondes.

Lecture : lire l'enregistrement sélectionné

Sélectionner : Sélection de l'enregistrement



Supprimer : supprimer l'enregistrement

MSG vocal SOS

Voir le chapitre juste au dessus **Choix MSG vocal SOS**

Calendrier

Vous pouvez consulter le calendrier et atteindre rapidement la date de votre choix. Vous pouvez consulter ou modifier un événement programmé à une date donnée. Vous pouvez y accéder directement en appuyant sur ▼. Pour vous déplacer une fois le calendrier affiché, utilisez les touches :

 et  pour aller vers la gauche ou la droite

▲/▼ pour aller vers le haut ou bas



. Pour changer de mois.

- Afficher** : pour consulter ou modifier un événement.
- Afficher tout** : pour consulter l'ensemble des événements programmés
- Ajouter un événement**
 - Annuler un événement** : pour annuler tout / certains événements en retard ou sur une période donnée
- Aller à une date** : pour atteindre directement la date programmée pour consulter ou modifier l'événement
- Aller à aujourd'hui** : pour atteindre la date du jour.

ORGANISEUR

Calculatrice


Le téléphone est équipé d'une calculatrice. Cet accessoire fait appel au clavier numérique.

Appuyez sur **Menu**.

Utilisez ▲ et ▼ pour afficher **ORGANISEUR**.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Calculatrice**

Utilisez le clavier pour entrer le premier nombre (la touche  permet d'insérer une virgule)

▲ pour le signe +
▼ pour le signe –
 pour le signe *
bouton **M2** pour le signe /
bouton **M1** pour le signe Egal

Utilisez le clavier pour entrer le deuxième nombre

ORGANISEUR

Remarque: la touche **Effacer** permet d'effacer le dernier caractère saisi. Maintenez enfoncée la touche de fonction **Effacer** pour effacer complètement l'affichage.

Alarme

Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes. Pour chacune, les options suivantes sont proposées :

- Activer/désactiver**
- Heure de l'alarme**
- Répéter l'alarme**: une fois, tous les jours, jours
- Rappel de l'alarme**: vous pouvez régler la durée, de 1 à 10 minutes
- Type d'alerte** : sonnerie seule, vibreur seul, sonnerie et vibreur.

Lorsque l'alarme retentit, si vous ne l'éteignez pas tout de suite, le rappel d'alarme est activé, l'alarme sonnera à nouveau 4 minutes plus tard. L'alarme sonnera ainsi encore 3 fois, avant de s'arrêter définitivement.

Bluetooth

Votre téléphone portable peut être relié à un périphérique compatible Bluetooth situé à moins de 10m.

ORGANISEUR

- Bluetooth:** Activer/désactiver
- Visibilité:** Activer/désactiver
- Mon appareil:** Le nom de l'appareil audio s'affiche après association
- Recherche des périphériques :** Avant d'entrer dans ce menu, activez le Bluetooth et branchez le kit mains-libres, puis lancez la recherche d'appareils audio. Vous serez invité à saisir le mot de passe du kit mains libres. Vous pourrez ensuite utiliser le Bluetooth pour parler ou lire des MP3, après avoir associé les appareils.

Remarque: Le mot de passe ou code est différent pour chaque constructeur ; consultez le manuel de votre périphérique Bluetooth pour plus de détails.

- Mon appareil:** Le nom de l'appareil audio s'affiche après association.
- Renommer l'appareil:** changer le nom de votre système, par défaut c'est CL8350.
- Avancé :**
- Chemin Audio :** laisser par le téléphone ou transférer vers appareil audio
- Mon adresse:** adresse du système

ORGANISEUR

Liste des tâches

Dans une tâche, vous pouvez rentrer les informations suivantes :

Date et Heure, le sujet, Alarme (Activer, 5 min avant, 10 min avant, 15 min avant, 30 min avant 1 jour avant), Répéter (une fois, tous les jours, le jours, hebdomadaire, Mensuel, Annuel), la priorité (normal, Haute, Basse), Description et l'état.

Vous pouvez consulter toutes les activités sauvegardées et les modifier:

- Afficher**: Pour consulter les détails de l'activité
- Ajouter** : Pour ajouter une nouvelle activité
- Modifier**: Pour modifier l'activité
- Effacer**: Pour supprimer l'activité
- Supprimer les anciennes**: Pour supprimer les activités dont la date est dépassée
- Tout Supprimer**: Pour supprimer toutes les activités
- Aller à une date** : Atteindre directement une date du planning pour consulter ou modifier une activité
- Envoyer Vcalendrier**: Pour envoyer l'activité par un message, SMS.
- Affichage incomplet**: affiche les activités incomplètes

Chronomètre

Deux fonctions de chronométrage différentes sont proposées:

- **Temps intermédiaire** : vous pouvez mesurer jusqu'à 20 temps intermédiaires pour chaque session.
- **Temps au tour** : vous pouvez mesurer jusqu'à 20 temps au tour pour chaque session

Voir les enregistrements : ici, vous pouvez consulter les sessions de chronométrage enregistrées.

Pour remettre à zéro le chronomètre, appuyer tout d'abord sur la touche de fonction PAUSE, puis sur Options, puis Réglage par Défaut pour réinitialiser les compteurs.

SERVICES

Compte de données

C'est ici que sont conservées les informations sur les données de connexion GSM.

JOURNAL DES APPELS

Consulter les listes d'appels

Le téléphone conserve des informations sur les appels:

appels en absence
appels émis
appels reçus
Effacer les journaux

Chaque journal peut archiver jusqu'à 20 numéros.

Appuyez sur la touche de fonction **Menu**

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
JOURNAL DES APPELS

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour
sélectionner

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour
sélectionner **Journal des appels**

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour parcourir le menu
et choisir **Appels en absence**, **Appels émis** ou
Appels reçus

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour

JOURNAL DES APPELS

sélectionner

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à l'appel de votre choix

Appuyez sur la touche de fonction **Options** et choisir la fonction que vous désirez :
Afficher/ Composer/ Envoyer un SMS/ Ajouter à la liste noire/ Modifier Num/ Supprimer

Vous accéderez alors à différentes informations concernant l'appel sélectionné: correspondant, numéro, date et heure...

Effacer les listes d'appels

Appuyez sur la touche de fonction **Menu**

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
JOURNAL DES APPELS

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour sélectionner

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour parcourir la boîte de réception **Effacer les journaux**

JOURNAL DES APPELS

Appuyez sur **OK** pour sélectionner

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour parcourir le menu et choisir **Appels en absence**, **Appels émis**, **Appels reçus** ou **Tout effacer**

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour sélectionner. Vous serez alors invité à confirmer votre choix. Choisissez **OUI** ou **NON**

Réglages d'appel

Différents réglages sont possibles pour les appels. Vous pouvez accéder aux réglages des appels par le chemin suivant:

Appuyez sur la touche de fonction **Menu**

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **JOURNAL DES APPELS**

Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Fonction d'appel**

JOURNAL DES APPELS

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour parcourir le menu et sélectionner **Signal d'appel, Renvoi d'appel, Appels restreints**

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour sélectionner

Signal d'appel

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la mise en attente des appels. Nous vous recommandons de vérifier la disponibilité de ce service (signal d'appel) auprès de votre opérateur téléphonique. Vous pouvez **Interroger le statut** pour vérifier si votre opérateur propose ce service.

Renvoi d'appel

Vous pouvez transférer les appels entrants vers un numéro de téléphone de votre choix ou généralement, vers la messagerie vocale. 5 options différentes sont proposées pour cette fonction :

- Tous les appels** : renvoie les appels dans tous les cas.
- Si inaccessible** : renvoie les appels si vous n'êtes pas joignable
- Si pas de réponse** : renvoie les appels lorsque vous ne répondez pas
- Renvoyer si occupé** : renvoie les appels lorsque

JOURNAL DES APPELS

la ligne est occupée

- Tous les appels de données** : renvoie les appels s'il s'agit d'appels de données
- Annuler tous les renvois** : annule tous les renvois

Appels restreints

Vous pouvez restreindre les appels passés et reçus avec votre téléphone. 2 options différentes sont proposées pour cette fonction :

- Bloquer Tous les appels sortants
 - Tous les appels
 - Tous les appels internationaux
 - Internationaux sauf payant

- Bloquer Tous les appels entrants

Vous pouvez annuler toutes les interdictions dans **Annuler tout** (vous serez invité à entrer un code)

Changer mot de passe : Changement du mot de passe qui est par défaut 1122.

Réglages avancés

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** pour accéder au menu

JOURNAL DES APPELS

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour afficher l'option
JOURNAL DES APPELS

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour sélectionner

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Réglages d'appel**

Appuyez sur **OK** pour sélectionner

Appuyez sur la touche de fonction **OK** pour sélectionner **Réglages avancés**

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **Réglages d'appel**

Vous pouvez maintenant choisir une des fonctions suivantes : **Liste noire/ Rappel automatique/ Affichage de la durée de l'appel/ Rappel du temps d'appel**

- Liste noire** : placez dans la liste noire les numéros auxquels vous ne souhaitez pas répondre (jusqu'à 20 numéros)

JOURNAL DES APPELS

- **Rappel Automatique** : si ce réglage est activé, lorsque vous passez un appel sans parvenir à joindre votre correspondant parce que sa ligne est occupée, le téléphone recomposera automatiquement le numéro après un certain temps. Ce service fonctionnera uniquement si vous n'avez pas annulé l'appel.
- **Affichage de la durée de l'appel**: pour choisir d'afficher ou non la durée de l'appel.

Bip de rappel du temps d'appel: Vous pouvez estimer précisément la durée de votre appel en activant le rappel. 3 options sont proposées : Désactiver / Simple / Périodique. Suivant le temps programmé, vous entendrez un bip.

ACCESSOIRES EN OPTION

Accessoires en option

- Casque filaire avec microphone et touche de prise d'appel
- Casque Bluetooth

DEPANNAGE

Impossible d'allumer le téléphone

- Vérifiez que la batterie est bien en place dans son logement

Pas d'affichage à l'écran

- Vérifiez que le téléphone est allumé
- Vérifiez que la batterie et la carte SIM sont bien en place

Le téléphone est allumé, et l'écran est figé.

- Entrez le code PUK pour débloquer la carte SIM

L'écran n'affiche aucun symbole de signal

- Il n'y a pas de connexion réseau. Déplacez-vous pour tenter d'atteindre une zone couverte par le signal
- Contactez votre opérateur

Un message indique une fonction est indisponible

- Votre opérateur ne propose peut-être pas la fonction voulue. Le service peut nécessiter la souscription d'un abonnement. Contactez votre opérateur.

Aucun affichage pendant la recharge

- La batterie est trop faible. Attendez quelques minutes.

Le message "Insérer carte SIM" ou "Service restreint" s'affiche à l'écran

- Vérifiez que la carte SIM est bien en place

La batterie se décharge rapidement ou refuse toute recharge.

- Laissez la batterie en charge pendant 4 heures

DEPANNAGE

- Vérifiez que le téléphone est bien posé sur le socle chargeur ou correctement relié à l'adaptateur secteur. Nettoyez les contacts de recharge du téléphone et du socle chargeur avec un chiffon doux et sec.
- Essayez avec une batterie neuve

Connexion au réseau impossible

- Le signal est trop faible ou les interférences radio perturbent le signal
- La carte SIM est-elle bien en place? Est-elle en bon état? Si la carte SIM est endommagée, contactez votre opérateur pour en obtenir une nouvelle.

Impossible de passer un appel

- La carte SIM est-elle enregistrée sur le réseau?
- La fonction d'interdiction des appels sortants est-elle activée?
- Le réseau rencontre peut-être des dysfonctionnements, contactez votre opérateur
- Vérifiez le numéro de l'opérateur, le numéro de la zone ou le numéro du centre NMC (voir Réglages du téléphone)

Impossible de prendre les appels:

- La fonction d'interdiction des appels entrants est-elle activée ?
- La fonction de renvoi d'appels est-elle activée?

DEPANNAGE

Le clavier semble verrouillé

- Éteignez et rallumez le téléphone
- Déverrouillez le clavier

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas

- Assurez-vous d'avoir souscrit un service de présentation du numéro. Contactez votre opérateur
- L'appelant peut avoir choisi de masquer son numéro
- Laissez le téléphone sonner plusieurs fois, la réception de l'identifiant de l'appelant peut prendre un peu de temps

Autre problème

- Lisez attentivement la notice d'utilisation
- Éteignez et rallumez encore le téléphone. Vérifiez si le problème persiste

SECURITE

Généralités

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.

Utilisez exclusivement la batterie rechargeable fournie avec le téléphone.

N'ouvrez jamais l'appareil (sauf pour remplacer la batterie) ni le socle chargeur. Contactez le service d'assistance si des réparations sont nécessaires.

Ne jetez jamais une batterie au feu. La batterie peut exploser et libérer des substances chimiques toxiques.

Si vous êtes certain de ne pas utiliser le téléphone pendant plus d'un mois, enlevez la batterie de l'appareil

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Nettoyez régulièrement les contacts de recharge du téléphone et du socle chargeur. N'utilisez ni lustrant ni produit nettoyant : vous pourriez endommager le revêtement extérieur ou les composants électriques à l'intérieur de l'appareil.

Environnement

Evitez d'exposer directement l'appareil aux rayons du soleil.

SECURITE

Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour de l'appareil.

Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide, par exemple dans une salle de bains.

N'exposez pas votre appareil au feu, protégez-le de tout environnement dangereux.

L'appareil a été conçu pour fonctionner à une température de -20°C à 60°C.

Utilisation

Ne négligez pas la lecture de ces quelques recommandations. Ne pas les respecter pourrait vous placer en situation de danger ou d'infraction à la législation.

SOYEZ PRUDENT

N'allumez pas votre téléphone sur les zones où l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite ou est susceptible de générer des interférences, de causer un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez la réglementation locale. Lorsque vous conduisez, gardez les mains libres pour contrôler le véhicule. Sur la route, votre première préoccupation doit être la sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent générer des

SECURITE

interférences. Les performances de votre téléphone pourront en être affectées.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES HÔPITAUX

Respectez les restrictions d'usage. Éteignez votre téléphone à proximité des appareils médicaux.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE DANS LES AVIONS

Respectez les restrictions d'usage. Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À LA STATION-SERVICE

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein à la pompe. N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stock de carburant ou de produits chimiques.

ÉTEIGNEZ VOTRE TÉLÉPHONE À PROXIMITÉ D'EXPLOSIFS

Respectez les restrictions d'usage. N'utilisez pas votre téléphone près d'un chantier faisant appel aux explosifs.

FAITES PREUVE DE BON SENS

Utilisez votre téléphone uniquement dans la position d'utilisation normale décrite dans la notice.

SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES

N'oubliez pas de sauvegarder vos informations importantes ou d'en conserver une copie par écrit.

RECHARGE

N'utilisez pas votre téléphone quand la batterie est en charge.

APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones font l'objet de mesures de compatibilité avec les appareils auditifs. Vous trouverez sur l'emballage de votre téléphone la mention "Compatible avec les appareils auditifs". Voici quelques explications sur ce label: L'utilisation de certains téléphones mobiles à proximité de certains types d'appareils auditifs (prothèses auditives et implants cochléaires) peut générer un bourdonnement ou un sifflement pour l'utilisateur. Certains appareils auditifs sont mieux protégés que d'autres contre ces interférences. De même, les téléphones ne génèrent pas tous le même niveau d'interférences. Les fabricants de téléphones sans fil ont mis en place un classement pour certains de leurs téléphones mobiles, pour aider les utilisateurs de prothèses auditives à trouver le téléphone qui leur conviendra le mieux. Tous les téléphones n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. Les téléphones évalués possèdent un label étiqueté ou imprimé sur l'emballage. Ce label ne garantit pas la compatibilité de l'appareil. Le résultat dépendra du niveau de perte d'audition de l'utilisateur et de la prothèse utilisée. Si vous utilisez un modèle de prothèse particulièrement sensible aux interférences, il se peut que vous ne parveniez pas à utiliser correctement un téléphone arborant le label de compatibilité. Pour déterminer s'il est adapté à vos besoins, la meilleure solution est d'essayer le téléphone avec votre appareil auditif.

SERVICES RESEAU

Pour utiliser le téléphone, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctionnalités de votre téléphone sont liées aux services proposés sur le réseau de votre opérateur. Ces services réseau peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux. Peut-être devrez-vous souscrire une option particulière auprès de votre opérateur avant de pouvoir utiliser certains services. Rapprochez-vous de votre opérateur de téléphonie pour connaître les modalités d'utilisation et les tarifs applicables aux services proposés. Certains réseaux sont soumis à des restrictions qui peuvent modifier l'accès aux services. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les services et caractères liés à la langue.

Il est possible que votre opérateur ait demandé que certaines fonctionnalités soient inaccessibles ou désactivées sur votre téléphone. Si tel est le cas, ces fonctionnalités n'apparaîtront pas dans les menus de l'appareil. Votre appareil a peut-être également reçu une configuration spécifique. Cela peut expliquer que le nom des menus, l'ordre dans lequel ils apparaissent et les symboles à l'écran soient différents de ceux qui sont décrits dans la notice. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

GARANTIE

Geemarc garantit cet appareil pour une durée d'un an pièces et main-d'œuvre à partir de la date d'achat. Pendant cette période, Geemarc réparera (ou remplacera si nécessaire) votre appareil gratuitement. En cas de problème, nous vous invitons à consulter notre site internet sur www.geemarc.com. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées ou les problèmes causés par la négligence de l'utilisateur. Seuls les techniciens agréés Geemarc sont autorisés à intervenir sur votre appareil. La garantie Geemarc ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi.

IMPORTANT: VOTRE FACTURE D'ACHAT EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA GARANTIE. ELLE VOUS SERA DEMANDÉE EN CAS D'INTERVENTION SOUS GARANTIE.

Attention : la garantie s'applique uniquement en France

GARANTIE

DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ: Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive) 1999/5/CEE.

Vous pouvez consulter l'intégralité de la déclaration de conformité sur www.geemarc.com



Raccordement électrique: L'appareil a été conçu pour fonctionner exclusivement avec une alimentation électrique de 230V 50Hz (classé "tension dangereuse" selon la norme EN 60950). L'appareil ne possède pas d'interrupteur général de mise sous tension/hors tension. Pour couper l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur au niveau de la prise électrique murale ou directement au niveau de la base. Quand vous choisirez l'emplacement de l'appareil, assurez-vous de pouvoir accéder facilement à la prise électrique à laquelle vous le brancherez.

RECYCLAGE

La directive WEEE (recyclage des appareils électriques et électroniques) a été mise en place pour assurer le recyclage des produits parvenus au terme de leur cycle de vie. Si votre appareil ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Nous vous remercions de bien vouloir suivre la procédure suivante:

- Enlevez les piles ou batteries de l'appareil et confiez-les à un centre de recyclage adapté. Déposez ensuite l'appareil dans un container de recyclage adapté.
- Vous pouvez également remettre votre appareil usagé à votre revendeur. Si vous achetez un nouvel appareil, le vendeur est tenu de vous reprendre l'ancien.

En appliquant ces quelques recommandations simples, vous contribuez à la protection de l'environnement et à la santé de tous.



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits:

www.geemarc.com

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.28.58.75.99 ou par fax au 03.28.58.75.76



UGCL8350_Fr_v1.1

geemarc United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support.
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHE CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE.
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Deutschland

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

www.geemarc.com