

Entretien

Pour un fonctionnement optimal de votre amplificateur, nous vous recommandons de

- Installer la pile dans le bon sens
- Enlever la pile après chaque utilisation
- Nettoyer régulièrement l'embout
- Eviter tout contact avec l'eau

Si le son est très faible et vague, nous vous recommandons de

- Vérifier que la pile a encore de l'énergie
- Changer de pile
- Nettoyer l'appareil avec un tissu sec et un produit nettoyant vendu chez un professionnel de l'audition.

Précautions d'usage

- Ne pas utiliser sur les patients atteints troubles auditifs.
- Ne pas utiliser à fort volume sur une longue période. Cela abimerait votre oreille. Si vous ressentez une gêne, arrêtez l'utilisation.
- Ne pas secouer ou faire tomber l'appareil.
- Ne pas ranger ou utiliser l'appareil dans un environnement à forte humidité ou haute température.
- Ne pas jeter les piles à la poubelle mais les rapporter dans les lieux où elles sont collectées.
- Enlevez la pile en cas d'une période de non utilisation prolongée. Le liquide dans la pile risquerait d'endommager les composants.
- Gardez hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion, de blessure ou de casse.

AMPLIFICATEUR DE SON

Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil.

Fonction

- Cet appareil muni d'une molette pour régler le volume permet d'amplifier le son.
- Il peut être utilisé en réunion et/ou pour regarder la télévision.

Spécifications

- 1 Son maximum 110 +/- 5DB
- 2 Gain de son \geq 50DB
- 3 Gamme de fréquence 200 ~ 4000 Hz
- 4 Réduction du bruit \leq 30%
- 5 Voltage DC 1.5V
- 6 Courant \leq 4.5 mA

Pile recommandée : Zinc-Air A10
Les piles ZINC AIR ont la plus grande durée de vie

Mode d'emploi

- Ouvrez la petite trappe et insérer la pile dans le bon sens.
- Avant usage assurez-vous que le son soit bien au minimum.
- Enfoncez fermement l'embout dans votre oreille.
- Montez le son et ajustez le volume avec le bâtonnet pour obtenir le niveau d'amplification désiré et une utilisation confortable.
- En cas de sifflement, vérifiez que l'embout est suffisamment bien introduit. Si vous ne pouvez pas l'enfoncer davantage changez de taille d'embout.
- Après usage retirez la pile pour éviter qu'elle ne se décharge.

Astuce : pour vérifier que votre pile a encore de l'énergie, introduisez la pile dans l'appareil et serrer fort l'appareil dans votre main. Si un petit sifflement résonne, c'est que la pile est encore chargée.

**Garantie 1 an
Piles non fournies**