

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil.

Fonction

- Cet appareil muni d'une molette pour régler le volume permet d'amplifier le son.
- Il peut être utilisé en réunion et/ou pour regarder la télévision.

Spécifications

- 1 Son maximum 110 +/- 5DB
- 2 Gain de son ≥ 50 DB
- 3 Gamme de fréquence 200 ~ 4000 Hz
- 4 Réduction du bruit $\leq 30\%$
- 5 Voltage DC 1.5V
- 6 Courant ≤ 4.5 mA

Pile recommandée : Zinc-Air A10
Les piles ZINC AIR ont la plus grande durée de vie

Mode d'emploi

- Ouvrez la petite trappe et insérer la pile dans le bon sens.
- Avant usage assurez-vous que le son soit bien au minimum.
- Enfoncez fermement l'embout dans votre oreille.
- Montez le son et ajustez le volume avec le bâtonnet pour obtenir le niveau d'amplification désiré et une utilisation confortable.
- En cas de sifflement, vérifiez que l'embout est suffisamment bien introduit. Si vous ne pouvez pas l'enfoncer davantage changez de taille d'embout.
- Après usage retirez la pile pour éviter qu'elle ne se décharge.

Astuce : pour vérifier que votre pile a encore de l'énergie, introduisez la pile dans l'appareil et serrer fort l'appareil dans votre main. Si un petit sifflement résonne, c'est que la pile est encore chargée.

Garantie 1 an
Piles non fournies