


Procédure Calibration VitaScan

1



Merci de suivre les instructions
Ci dessous avant d'executer une
calibration

2

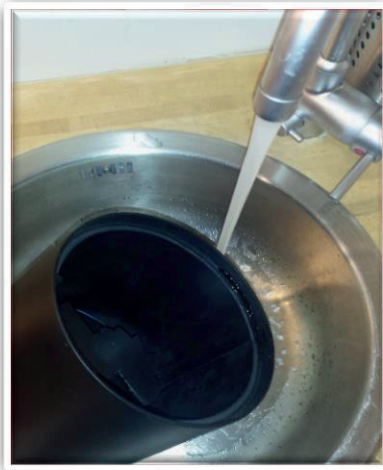

Rincer le récipient abondamment
avant de commencer. Après
rincer vérifier que le récipient
soit bien propre

3



Positionner le couvercle
en plastique avec la forme
géométrique de manière
à être aligner avec la forme
au fond du récipient. Voir photo.
Bien vérifier que le couvercle
soit bien positionné dans l'encoche
noire.
Si les deux formes sont alignées
vous pouvez alors retirer
le couvercle en plastique

Procédure Calibration VitaScan

4



Remplir soigneusement le récipient avec de l'eau stérile ou pré bouillie.
Remplir jusqu'à la bordure intérieure.
Une fois le récipient rempli, attendre au moins 5 minutes avant de passer à l'étape suivante.
Ceci afin d'être sûr qu'il n'y a plus de bulles dans l'eau.

Attention :
Ne pas utiliser de l'eau chaude !

5



Placer le couvercle avec le support de sonde.
Vérifier que le couvercle soit bien calé dans l'encoche noire du récipient.

6



Insérer la sonde dans le support de sonde.
Vérifier que la sonde soit bien calée et qu'elle ne bouge pas.

Lancer ensuite le logiciel de calibration et suivre les instructions sur l'écran