

Moniteur Welch Allyn Connex® Spot

Carte aide-mémoire

Table des matières

Bouton d'alimentation.....	2
Mise hors tension	2
Ouverture de session et sélection d'un profil.....	2
État de la batterie	2
Changement de profil.....	2
Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle	2
Démarrage des intervalles.....	2
Arrêt des intervalles.....	2
Indicateurs et commandes d'alarme.....	3
Saisie manuelle des mesures des signes vitaux	3
Saisie de paramètres manuels	3
Gestion des dossiers des patients.....	3
Ajout d'un patient	4
Nettoyage de l'équipement	4

Profil de consultation	5–7
Saisie manuelle des informations sur le patient.....	5
Saisie du poids et de la taille	5
Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle	5
Saisie du niveau de douleur	5
Effacement des données de patients	5
Enregistrement des données du patient.....	5
Lancement d'un programme de moyennage de la PNI.....	6
Résultats d'un programme de moyennage de la PNI	6
Connexion d'appareils Bluetooth® et téléchargement de données	7

Bouton d'alimentation




- Installé sur le boîtier de l'appareil
- Met le moniteur sous tension
- Ouvre une boîte de dialogue qui gère la fermeture de session, la mise hors tension et l'accès au mode Veille

Mise hors tension

1. Appuyez sur le bouton de mise hors tension.
2. Appuyez sur **Power down (Mettre hors tension)**.

Ouverture de session et sélection d'un profil (s'il est activé)

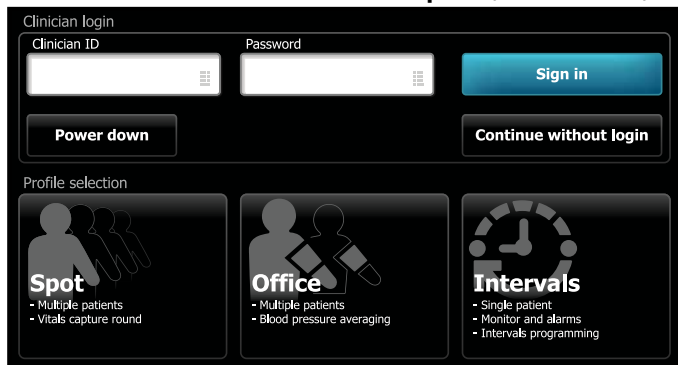

1. Saisissez votre ID et votre mot de passe de médecin dans les champs correspondants. Appuyez sur le symbole du clavier dans chaque champ pour entrer les caractères ou utilisez un lecteur de codes à barres pour scanner votre ID de médecin puis pour entrer votre mot de passe.
2. Appuyez sur **Sign in (Ouverture de session)**. La zone de sélection du profil devient active.
3. Appuyez sur le profil souhaité. L'onglet Home (Accueil) correspondant s'affiche.

2

État de la batterie



En charge



Durée de fonctionnement restante approximative



Batterie absente ou déchargée

Changement de profil




1. Appuyez sur l'indicateur du profil dans la zone d'état de l'appareil.
2. Appuyez sur le profil souhaité. Les onglets associés à ce profil apparaissent au bas de l'écran.

Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle




Démarrage des intervalles



1. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur .
2. Sélectionnez **Automatic (Automatique)**, **Stat** ou **Programme**, puis entrez ou sélectionnez les paramètres voulus.
3. Appuyez sur **Start intervals (Dém. interv.)**.

Arrêt des intervalles











1. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur .
2. Appuyez sur **Stop intervals (Arrêt intervalles)**.

WelchAlllyn

Advancing Frontline Care™


Indicateurs et commandes d'alarme

Icône	Description
	Alarme désactivée Aucune notification visuelle ou sonore n'est activée.
	Alarme activée Les notifications visuelles et sonores sont activées.
	Son de l'alarme désactivé Seules les notifications visuelles sont activées.
	Son de l'alarme suspendu La minuterie est active.
	Alarme active Appuyez sur cette commande pour mettre en pause ou désactiver la tonalité.
	Alarmes multiples actives Appuyez sur cette commande pour mettre en pause ou désactiver la tonalité.
	Alarme de priorité moyenne Appuyez sur cette commande pour ajuster les limites d'alarme ou désactiver les alarmes.
	Alarme de priorité élevée Appuyez sur cette commande pour ajuster les limites d'alarme ou désactiver les alarmes.

Saisie manuelle des mesures des signes vitaux

1. Appuyez et maintenez une pression sur un volet tel que **NIBP (PNI)**. Une boîte de dialogue s'affiche en incrustation.
2. Saisissez manuellement la valeur.
3. Appuyez sur **OK**. La nouvelle valeur apparaît dans le volet.

Saisie de paramètres manuels

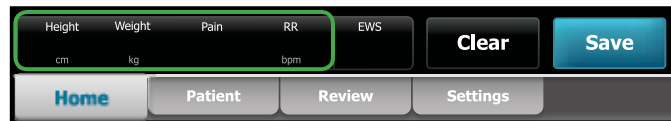

1. Appuyez sur le volet des paramètres manuels.
2. Appuyez sur le pavé numérique, dans les champs sélectionnés, pour ajuster les mesures des paramètres.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Save (Enregistrer)** pour enregistrer les données.

Gestion des dossiers des patients


Les dossiers des patients peuvent être imprimés ou supprimés.


1. Appuyez sur l'onglet **Review (Revue)**.
2. Sélectionnez les dossiers en appuyant sur la case à cocher en regard de chaque nom de patient voulu.
3. Appuyez sur **Send (Env)** pour transmettre les dossiers sur le réseau ou sur **Delete (Supprimer)** pour supprimer définitivement les dossiers.

Ajout d'un patient

The screenshot shows a patient entry form with the following fields and sections:

- Patient Section:**
 - First name
 - Patient ID
 - Last name
 - Patient type (dropdown menu)
 - Middle initial
 - Date of Birth
- Location Section:**
 - Room
 - Bed
- Buttons:** OK, Clear
- Navigation Bar:** Home, Patient (active), Review, Alarms, Settings

1. Appuyez sur l'onglet **Patient (Patients)**.
2. Appuyez sur  dans n'importe quel champ, puis saisissez les informations patient.
3. Appuyez sur **Next (Suivant)** pour parcourir les champs de données patient.

Remarque Vous pouvez utiliser un lecteur de codes à barres pour entrer un ID de patient dans le champ ID patient. Appuyez sur  dans le champ ID patient, scannez le code à barres, puis appuyez sur **OK**.

4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer et revenir à l'onglet Home (Accueil).

Remarque Les entrées ne seront enregistrées que si vous appuyez sur **OK**.

Nettoyage de l'équipement

Respectez les instructions du fabricant du produit nettoyant pour préparer la solution, le cas échéant, et nettoyez toutes les surfaces exposées du moniteur, de la surface de travail de l'APM (Accessory Power Management), des corbeilles et paniers, des cordons et des câbles, et du socle. Nettoyez toutes les surfaces de façon à éliminer toute salissure visible. Changez de lingette ou de chiffon au cours de la procédure de nettoyage, si nécessaire.

1. Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise de courant.
2. Nettoyez le dessus du moniteur.
3. Nettoyez les côtés, le devant et le dos du moniteur.
4. Évitez la formation de film résiduel sur l'écran LCD en l'essuyant régulièrement à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'eau (à la suite du passage du produit nettoyant/de la lingette désinfectante), puis séchez l'écran à l'aide d'un chiffon propre.
5. Nettoyez le dessous du moniteur.
6. Nettoyez la surface de travail de l'APM.
7. Nettoyez les corbeilles ou le panier.
8. Nettoyez le cordon d'alimentation CA et le montage de câble d'alimentation/USB de la surface de travail de l'APM.
9. Nettoyez le socle de haut en bas.

Reportez-vous à la section « Préparation du nettoyage de l'équipement », dans le *Mode d'emploi*, pour obtenir une liste des produits nettoyants agréés.

ATTENTION N'utilisez pas de produits nettoyants non autorisés. L'utilisation de produits non autorisés risque d'endommager les composants.

Profil de consultation

The screenshot shows a patient profile screen with the following elements and callouts:

- 1**: Patient ID field containing '5930287'.
- 2**: BMI field containing '23.4'.
- 3**: NIBP (Blood Pressure) field containing '111/62'.
- 4**: PAIN field containing '2'.
- 5**: 'Clear' button.
- 6**: 'Save' button.

Other visible data includes: clinician name, location, time (03:00), SpO2 (100%), Pulse Rate (63), Temperature (98.3), Height (76), and Weight (160.2).

1 Saisie manuelle des informations sur le patient

1. Appuyez sur l'icône du clavier dans le volet Patient.
2. Entrez les informations sur le patient.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le type de patient, appuyez sur la touche du type de patient (située sur le côté droit du volet Patient).

2 Saisie du poids et de la taille

Appuyez sur les touches fléchées vers le haut/bas ou le pavé numérique pour ajuster manuellement le poids et la taille.

La valeur d'IMC varie en fonction du poids et de la taille entrés.

3 Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle

4 Saisie du niveau de douleur

Appuyez sur les touches fléchées vers le haut/bas ou le pavé numérique pour ajuster manuellement le niveau de douleur.


5 Effacement des données de patients


Appuyez sur **Clear (Effacer)** pour supprimer toutes les mesures de l'onglet Home (Accueil) sans les enregistrer.

6 Enregistrement des données du patient

Après avoir effectué des mesures sur un patient, appuyez sur **Save (Enregistrer)**.

Lancement d'un programme de moyennage de la PNI

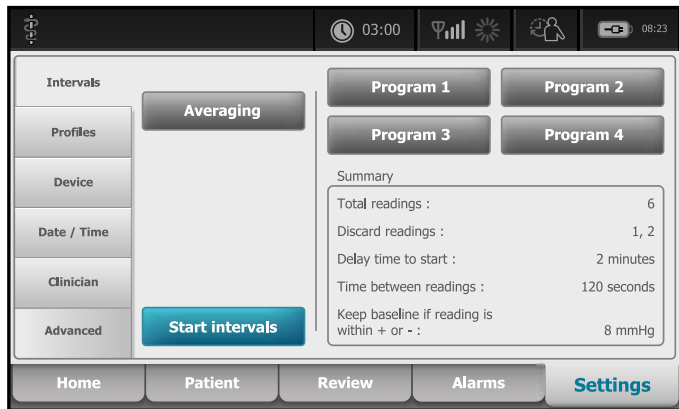

1. Choisissez un brassard de taille appropriée et positionnez-le autour du bras nu du patient.
2. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur . L'onglet Intervals (Intervalle), représenté ci-dessus, s'affiche.
3. Appuyez sur le programme voulu.
4. Lisez les informations du Résumé afin de vous assurer que les paramètres sont adaptés à votre patient.
5. Appuyez sur **Start intervals (Dém. interv.)** pour lancer le programme.


Résultats d'un programme de moyennage de la PNI



- 1 Affiche la moyenne des mesures.
- 2 Affiche NIBP AVERAGED (PNI MOYENNÉE).
- 3
 - Affiche les mesures effectuées par le programme.
 - Une mesure barrée d'une ligne est exclue de la moyenne.

Remarque Pour conserver une moyenne de la PNI, appuyez sur **Save (Enregistrer)**.

Connexion d'appareils Bluetooth® et téléchargement de données (profil de consultation uniquement)

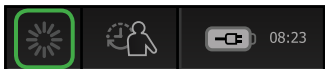

1. Si l'écran de connexion *Bluetooth* ne s'affiche pas automatiquement lorsque vous ouvrez le profil de consultation, appuyez sur la zone de connexion située en haut de l'écran.
2. Dans l'écran de connexion *Bluetooth*, sélectionnez un ordinateur portable dans la liste des appareils appairés. L'icône *Bluetooth* clignote rapidement dans la zone d'état de l'appareil lorsque le moniteur et l'ordinateur portable se connectent. Un message d'information apparaît brièvement pour désigner l'ordinateur portable connecté. Lorsque le message disparaît, le nom de l'ordinateur portable connecté apparaît en haut à gauche de l'écran et une icône *Bluetooth* connecté s'affiche dans la zone de connexion.
3. Observez la roulette d'indication de la progression dans la zone de connexion au fil du téléchargement des données sur l'ordinateur portable (ci-dessus). La connexion *Bluetooth* reste active jusqu'à la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement réussi, le système efface les données du moniteur et déconnecte ce dernier de l'ordinateur portable.
4. Répétez le processus, si nécessaire, ou appuyez sur **Cancel (Annuler)** pour fermer l'écran de connexion *Bluetooth*.