

# Infratemp<sup>®3</sup>



## FICHE TECHNIQUE

Plage de mesure de la température :

Mode Front : 34--42.2°C (93.2--108°F)

Mode Surface : 34--42.2°C (93.2--108°F)

Précision de mesure :

Mode Front : ±0.2°C (0.4°F) pour une plage de 35--42°C (95--107.6°F),

±0.3°C (0.5°F) pour les autres valeurs.

Mode Surface : ±0.3°C (0.5°F) pour une plage de -22--80°C (-7.6--176°F),  
environ ±4% ou ±2°C (4°F) pour les valeurs les plus élevées.

Plage de fonctionnement :

10--40°C (50--104°F), 15%--85% RH

Conditions de stockage :

-20--+50°C, RH ≤ 85%

Contenu de la boîte :

Thermomètre x1 - Manuel d'utilisation x1 - Pile LR03 AAA x2



Distribué par :  
**FRAFITO**  
DIAGNOSTIC &  
CONFORT MEDICAL

[www.frafito.net](http://www.frafito.net)



## COMMENT UTILISER Infratemp<sup>®3</sup> ?

- 1 Appuyez sur «START» pour démarrer le thermomètre.
- 2 L'appareil est prêt à l'emploi lorsque l'image ci-contre apparaît sur l'écran.
- 3 Appuyez sur «START» en tenant l'appareil à maximum 4 cm du front. Au signal sonore, la température mesurée apparaît sur l'écran et sera mémorisée.
- 4 L'appareil s'arrête automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant plus d'une minute.

Distribué par :  
**FRAFITO**  
DIAGNOSTIC &  
CONFORT MEDICAL

[www.frafito.net](http://www.frafito.net)



## THÉRMOMÈTRE MÉDICAL

SANS CONTACT - INSTANTANÉ - PRÉCIS - COMPACT



SCAN À DISTANCE  
≤ 4CM



RÉTRO-ÉCLAIRAGE  
LED BLEU

**HYGIÉNIQUE**  
Technologie sans contact qui prévient tout risque de transmission de maladie

### PRATIQUE

Ecran rétro-éclairé qui alerte en cas de fièvre (rouge ou vert)

**MULTI-USAGE**  
Mesure la température du corps, du bain ou en creux du biberon pour tout âge

Sans contact  
4 cm

# Infratemp<sup>®3</sup>

Infratemp<sup>®3</sup>

Please read the instructions for use

BF type applied part

Radiant Innovation Inc.

[Http://www.radiantek.com.tw](http://www.radiantek.com.tw)

Add: 1F, No.3, Industrial East 9<sup>th</sup> Road,

Science-Based Industrial Park, HsinChu, Taiwan 300.


Medical Technology Promedt Consulting GmbH  
Add: Altenhofstrasse 80, D-66386 St. Ingbert,  
Germany



1639  
23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - Bât. E  
06200 Nice - France

**FRAFITO**  
DIAGNOSTIC &  
CONFORT MEDICAL

T. 04 93 72 53 54 | F. 04 93 21 03 83 | [infos@frafito.net](mailto:infos@frafito.net)

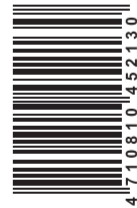

Made in China