



# MESI ABPI MD: Conseils pour l'utilisation des brassards


Assurez-vous que le brassard est bien en contact avec la jambe. Avec une anatomie « conique », le brassard peut être positionné un peu croisé, cela n'affectera pas la mesure, au contraire.

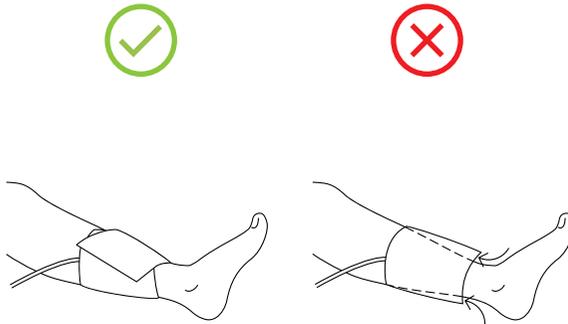

Lors du rangement des brassards, assurez-vous qu'ils soient pliés à plat et que la vessie à l'intérieur du tissu ne soit pas vrillée ou bouchonnée. Ne roulez pas le brassard. Ne les laissez pas non plus dépliés.

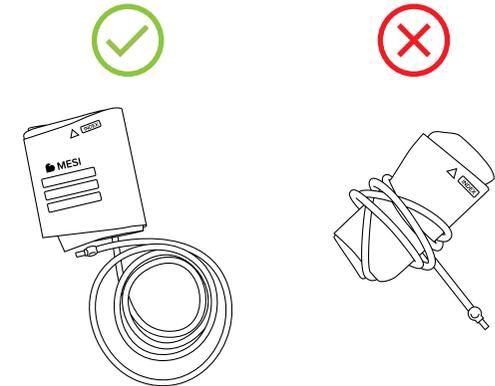

Assurez-vous d'utiliser la bonne taille de brassard. Le petit index doit être en face de l'indicateur «OK». Si l'index sur le brassard est en dehors de la zone « OK », utilisez un brassard de taille L.

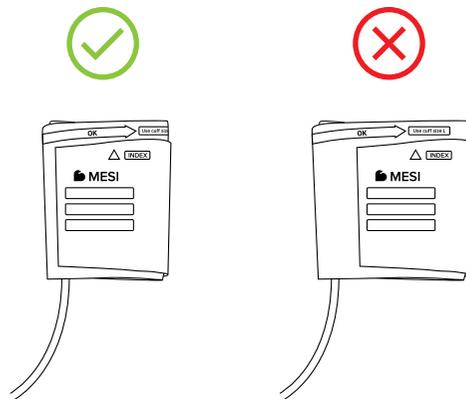

Assurez-vous que les tubulures des brassards ne soient pas coincées ou pincées lors de la mesure.

