



Mode d'emploi & Précaution d'emploi

Mode d'emploi

1. Raser les poils gênant et essuyer la peau pour la sécher.
2. Appliquer les électrodes en posant fermement un bord sur le patient et en la « déroulant » d'un bord à l'autre. Faire attention de ne pas piéger des bulles d'air entre le gel et la peau.
3. Raccorder les électrodes au défibrillateur.

IMPORTANT

Mise en garde : remplacer les électrodes au bout de 24 heures ou après 8 heures de stimulation continue

- Ouvrir juste avant d'utiliser
- Ne pas utiliser si gel est desséché.
- Utiliser uniquement avec les produits pour stimulateur cardiaque/défibrillateur ZOLL.
- Ne pas plier.
-

L'utilisation de ce produit par des secouristes non professionnels est déconseillée.

Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

Température de stockage à court terme : -30°C à 65°C

Température de stockage à long terme : 0°C à 35°C

Voisins le Bretonneux, le 4 juillet 2017

Patrice BLECHET
Gérant